

E・Zミストル用 接続チューブ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は内視鏡下手術時に発生するミスト及び煙を排気装置にて排気する際、排気装置と内視鏡用処置具等とを繋げるチューブとして用いる。本品は両端にタケノコ形状のコネクタを有するため、サイズの異なる排気チューブとも接続が可能。又、八光製「E・Zミストル」にセットすることで、排気の実行と停止を操作することができる。

＜構造図(代表図)＞

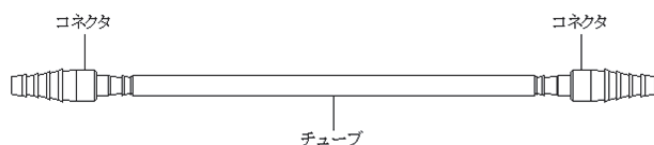

コネクタの適用チューブ内径は、8～13 mmである。

【使用目的又は効果】

本品は、八光製「E・Zミストル」専用の排気チューブとして内視鏡下手術における気腹器の排気装置と内視鏡用処置具、又はトロカールとの間を繋げるチューブとして用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品の一方のコネクタを内視鏡処置具又はトロカール側のチューブと接続する。
- 2) 他端のコネクタを排気装置側のチューブと接続する。
- 3) E・Zミストルのペダルのつま先側両端にあるチューブ嵌め込み部にチューブを嵌め込む。(図1参照)
- 4) 嵌め込んだら、E・Zミストルのペダルを踏み込み、その状態でチューブ嵌め込み部から両側に出ているチューブを矢印の方向へ軽く引っ張り、チューブのたるみを取る。(図2参照)
- 5) E・Zミストルのペダルの踏み込みを解除する。
- 6) E・Zミストルのペダルを踏み込みむと排気を実行する。ペダルの踏み込みを解除すると、排気を停止することができる。

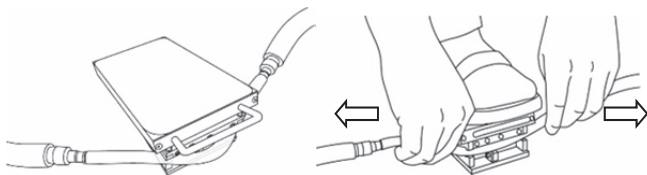


図1

図2

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) E・Zミストルのペダルを踏み込んだ状態で、E・Zミストルの隙間に指を入れないこと。
[踏み込みを解除した際、指を挟んで損傷する恐れがある。]
- 3) 接続は確実に行い、使用中は緩みや破損がないことを定期的に確認すること。
[排気不良の可能性ある。]
- 4) チューブが折り曲げられたり引っ張られたりした状態で使用しないこと。
[チューブ結合部等の破損、外れが生じる可能性がある。]

【使用上の注意】

＜不具合・有害事象＞

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合
 - ① 本品破損
 - ② 漏れ
- 2) 重大な有害事象
 - ① 感染
- 3) その他の有害事象
 - ① 指の損傷(「E・Zミストル」による挟み込み)

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

＜有効期間＞

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

株式会社八光
TEL 026-275-0121

＜製造業者＞

株式会社八光

販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500