


八光持続硬膜外麻酔カテーテル


HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL CATHETER 医療機器承認番号：14700BZZ00227000

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)

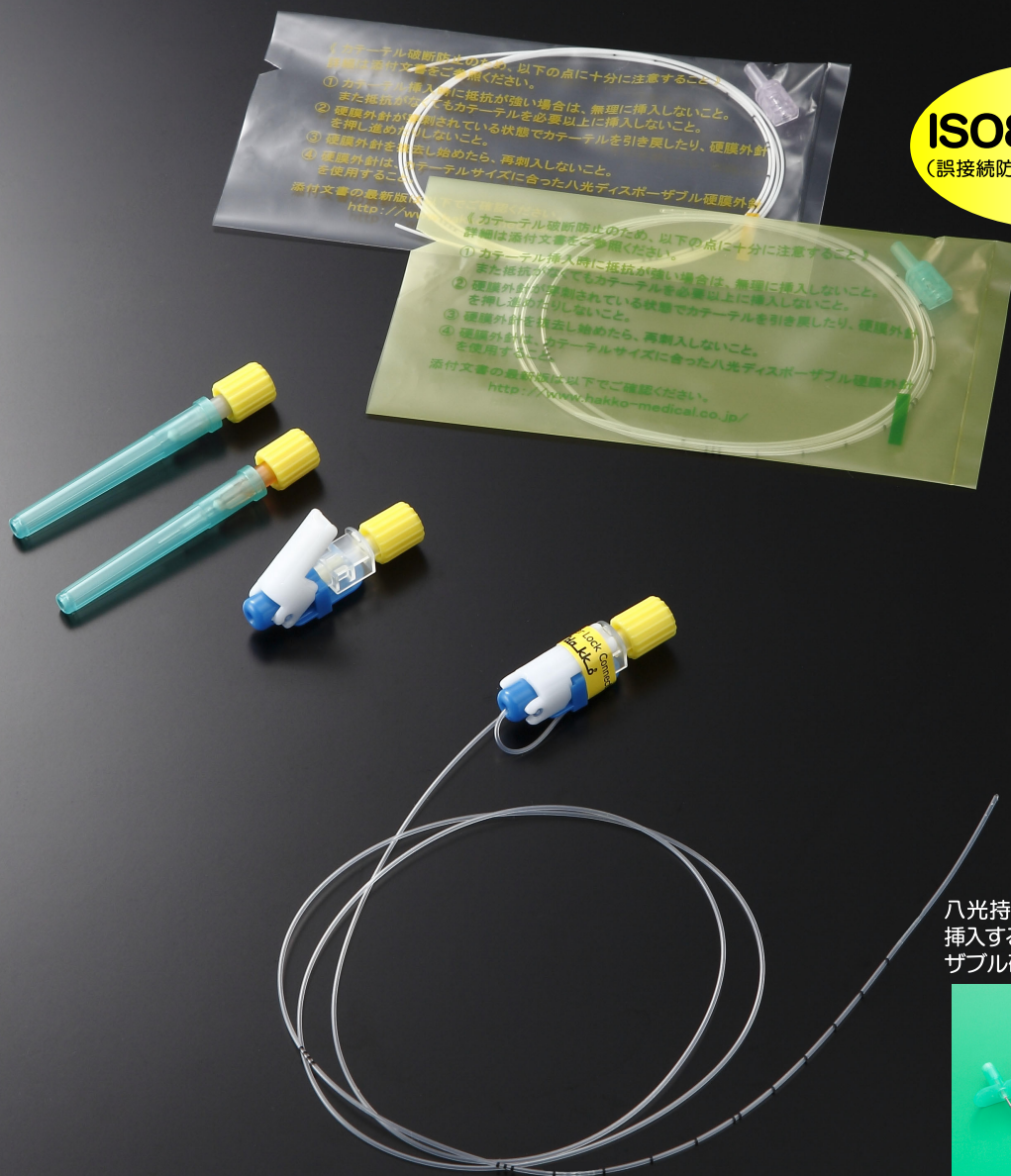

八光持続硬膜外麻酔カテーテルを挿入する際には、必ず八光ディスプレイ硬膜外針をご使用ください。

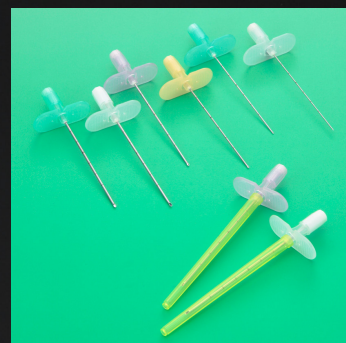


医療機器承認番号：14700BZZ01170000

適応

持続硬膜外麻酔

特長

- カテーテルはしなやかで、柔軟性があります。
- カテーテル先端部は円鈍で、硬膜壁損傷や血管内への迷入の危険性を低減させます。
- カテーテル先端部の側孔は2孔式で、麻酔液が効果的に広がります。また、一方が組織等により閉塞した場合においても、他方より麻酔液の注入が可能です。
- カテーテルには先端より5 cm以降1 cmピッチで15 cmまでメモリがついています。このメモリにより、カテーテル挿入時ならびに留置時における位置確認ができます。

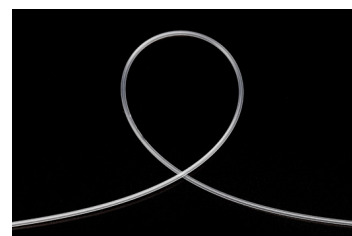

hako

硬膜外麻酔用カテーテル 高度管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー



本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

使用方法


＜カテーテルコネクター（リニアロックコネクター） 操作方法＞

■カテーテルを接続する場合（固定）


1. プランジャー先端より、硬膜外麻酔用カテーテルを挿入する。
カテーテル端部が最深部まで到達していることを確認してください。（図①②）

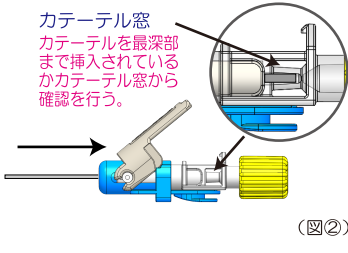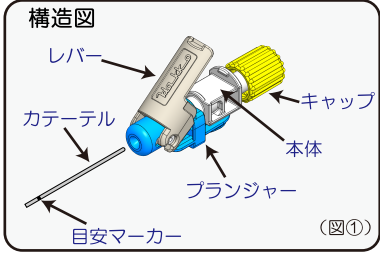


2. レバーを押し込み、本体に固定します。（図③④⑤）

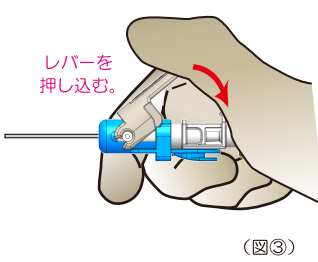

1 段階ロック：ハーフロック
テストドーズなどを目的に、カテーテルを一時的に接続する場合、レバーを途中まで押し込んだ状態にします。


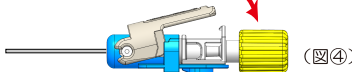


2 段階ロック：完全ロック
「カチッ」と音が鳴るまでレバーを押し込みます。確実にロックがされているかを確認してください。
「カチッ」

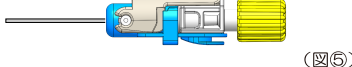

■カテーテルの接続を解除する場合



1. 本品全体を湾曲させ、レバー側凹部とロック用ツメの固定解除を行います。（図⑥⑦）

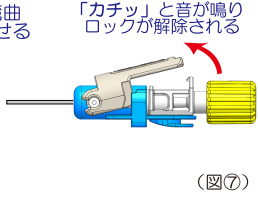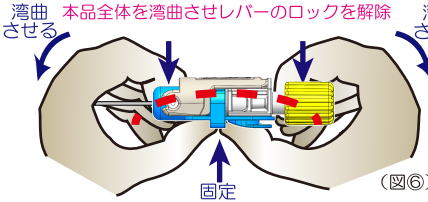


2. レバーを開放させ、プランジャーを前方へ少し引き出しカテーテルを取り出します。（図⑧⑨⑩）

- 1) レバーを持ち上げ解放させる。

- 2) プランジャーを少し引き出します。

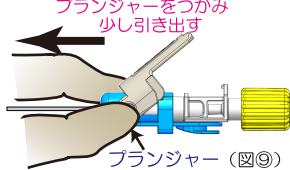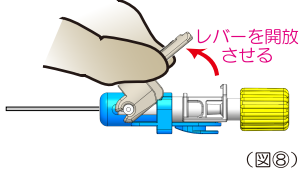

- 3) カテーテルを取り外します。
カテーテルを取り出す

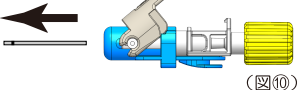


＜接続鈍針用着脱アダプターの使用方法（17G用のみ）＞

■カテーテルを接続する場合


1. 着脱アダプター（以下アダプター）をスライドさせ、アダプターの突起部と鈍針の先端部を一致させます。



2. アダプターの後端部（図の位置）を指で押さえ、硬膜外麻酔用カテーテル（以下カテーテル）をアダプターに挿入します。

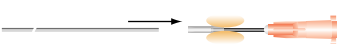

3. カテーテルとアダプターの両方を指で押さえ（図の位置）鈍針をスライドさせます。

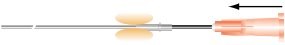

4. アダプターを針基へスライドさせてください。
以上で接続は完了です。



※カテーテルの接続が不十分の場合（5mm以下）カテーテルを鈍針に押し込んでください。


■カテーテルを取り外す場合

- アダプターを保持し、鈍針を矢印の方向へ引き抜いてください。



尚、カテーテル側にアダプターが残りますので、再接続する必要がある場合には、アダプターを鈍針へ再挿入してください。後は、同様な方法で再接続が可能です。

■カテーテルインサーターの使用方法

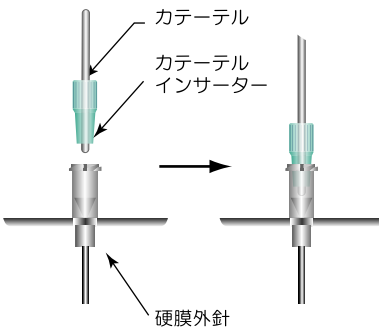

カテーテルをカテーテルインサーターに挿入し硬膜外針の針基に接続し、カテーテルを挿入してください。
カテーテル挿入後は、取り外してください。

■鈍針カバーの利用方法

鈍針カバーをカテーテル保護シースとしてご使用頂けます。（カテーテルと鈍針を接続する前にカテーテルを鈍針カバーに通してください。）



同時にご使用になる硬膜外針は、持続硬膜外麻酔カテーテルのサイズに対応したハ光ディスポーザブル硬膜外針をお使いください。
接続鈍針用着脱アダプター、カテーテルインサーター、鈍針カバーは、製品によって付属していない場合もあります。

仕様

「＊」は準規格品です。

製品コード	型式・サイズ	包装形態
27310016	17G用 1.0X950mm I 接続用鈍針25G付	1箱 25セット入り 1セット毎ブリスター包装 EOG滅菌済
27310026＊	17G用 1.0X950mm TR 接続用鈍針25G付 X線不透過（フッ素系樹脂）	
27310426	18G用 0.8X950mm I 接続用鈍針27G付	
27310546	17G用 1.0X950mm I 接続用鈍針25G付、リニアロックコネクター付	

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。