

## 酸素マスク

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止


#### <適用対象(患者)>

- \* 本品を装着できないような患者(顔面骨折や熱傷等)には使用しないこと。  
 [適切に酸素を投与できない恐れがある。]

#### 【形状・構造及び原理等】

- \* マスク本体を開くことで、立体形状となるため、患者の鼻、口を覆うことが可能となり、患者に酸素ガスを供給できる。

#### <構造図(代表図)>

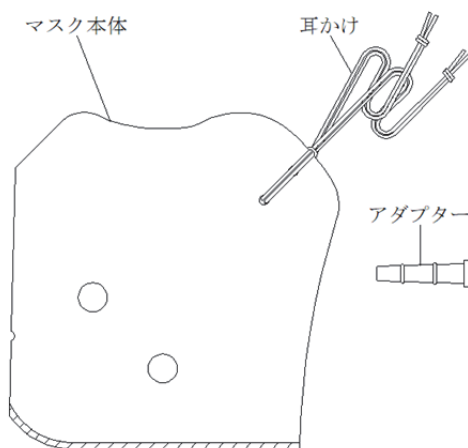

- \* マスク本体: ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))

#### 【使用目的又は効果】

- \* 人工呼吸器の呼吸回路に接続し、患者の鼻、口をおおい、患者に人工呼吸器からのガスを供給するためのマスク。

#### 【使用方法等】

- 1) アダプターをマスク本体の折り目上にある小穴に、内側から先端(チューブの戻り止め側)を外に出すように装填する。
- 2) アダプターに酸素供給チューブを接続する。
- 3) アダプターが上になるように顔面へ装着し、顔の大きさに合わせて耳かけの長さを調節する。
- 4) 毎分5~6Lの酸素量で使用する。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際には、汚染に十分注意すること。
- 2) 使用前に本品の接続を確実にを行い、各接続部からガス漏れがないことを確認すること。  
 [適切に酸素を投与できない恐れがある。]
- 3) アダプターと酸素供給チューブとの接続は確実にを行い、使用中は緩みがないことを定期的に確認すること。

#### 【使用上の注意】

##### <不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合

- ① マスク本体の破損
  - ② ガス漏れ
- 2) 重大な有害事象
    - ① 感染
  - 3) その他の有害事象
    - ① アレルギー反応

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### <保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

##### <有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### <製造販売業者>

株式会社八光  
 TEL 026-275-0121

##### \* <製造業者>

株式会社八光

#### 販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目 42-6  
 TEL 03-5804-8500