

女性用CICキット「フェミナ」


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

<構造図(代表図)>

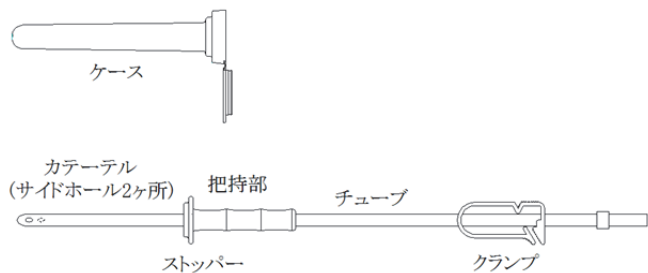

カテーテル及びストップパー：ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))

【使用目的又は効果】

- * 在宅自己導尿用カテーテルとして使用する。

【使用方法等】

- 1) 手を清潔にしておく。
- 2) 小陰唇を広げ、洗浄綿等で局所を消毒する。
- 3) クランプを閉じる。
- 4) カテーテル先端部からストップパー近くまで潤滑剤を付ける。(図1参照)
- 5) 小陰唇を広げ、カテーテルを尿道口からゆっくりストップパー近く(約50~70ミリ)まで挿入する。(図2参照)
- 6) クランプを持ち、チューブの端部を便器内(又は目盛付尿器)に向けた後、クランプを開いて尿の排出を行う。(図3参照)
- 7) 腹圧などを利用して膀胱内の尿を完全に導尿し、カテーテルをゆっくり抜去する。



図1

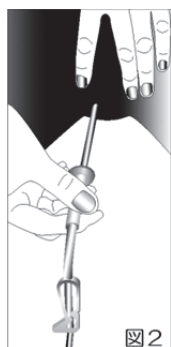


図2

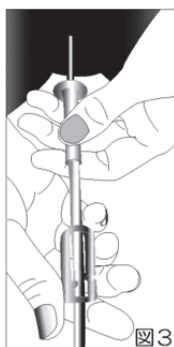


図3

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) 使用する前にクランプを閉じておくこと。
[尿が意図しない場所に排出される。]
- 3) カテーテルを抜去する際は、ゆっくりと引き抜くこと。
[粘膜損傷を引き起こす恐れがある。]

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

脂溶性の医薬品等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ(2-エチルヘキシル)が溶出する恐れがあるので注意すること。

<不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

1) その他の不具合

- ① 本品破損
- 2) 重大な有害事象

① 感染

3) その他の有害事象

- ① アレルギー反応
- ② 粘膜損傷

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【主要文献及び文献請求先】

<主要文献>

渡辺 秀輝:操作性・快適性を高めた女性用自己導尿カテーテル. 臨床泌尿器科 第51巻 第12号:972-973, 1997

<文献請求先>

株式会社八光 メディカル事業部 開発室
 TEL 03-5804-8500

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社八光
 TEL 026-275-0121

<製造業者>

株式会社八光

販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目42-6
 TEL 03-5804-8500