

イージー E・Zリンク



医療機器届出番号：20B1X00005000034
内視鏡用イントロデューサ及びエキストラクタ（クラス：I）

適応

- E・Zアクセス用 10/12mm ポート


特長

- E・Zアクセスに 10/12mmポートを追加するために使用します。
- 10、12mm 内視鏡用デバイスの挿入が可能です。


< 注意事項 >

- ・本品に挿入可能なデバイスの外径は、 $\phi 9.0 - 13.0\text{mm}$ です。予め、併用する機器が挿入、使用できるか確認を行ってください。
- ・屈曲や開閉機能をもつデバイスを挿入・抜去する場合は、屈曲を解除もしくは閉じた状態で、ゆっくり慎重に行ってください。

E・Zアクセスに、E・Zトロッカー（5mm）を外筒まで刺入し、穴を開け抜去します。


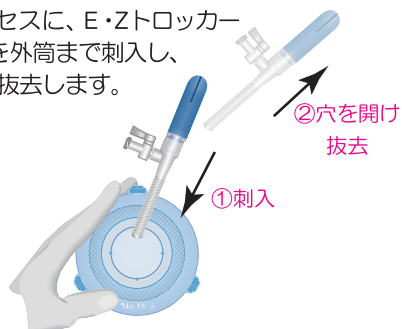


E・Zトロッカーにて穴を開けた箇所へE・Zリンクをねじ込みます。

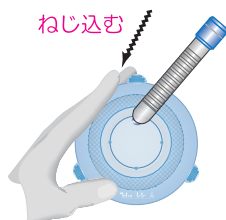

刺入したトロカールの先端がラッププロテクターならびに臓器に接触しないよう注意し、予め腹部に装着しているラッププロテクターの上リングを全周にわたって内溝へE・Zアクセスを装着します。

臓器等に接触しないよう注意しながら装着する。

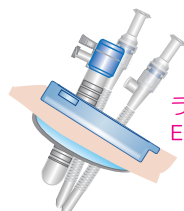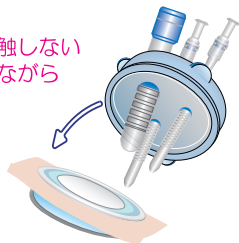


使用例



$\phi 13.2 \times \phi 15.6 \times 95\text{mm}$

(挿入適応径 $\phi 9.0 \sim 13.0\text{mm}$)

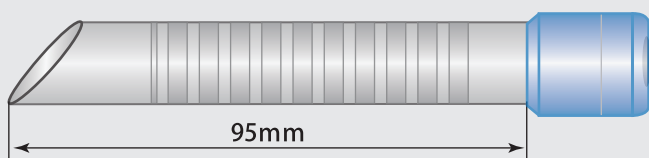

仕様

製品コード（JANコード）	規格
29111700	$\phi 13.2 \times \phi 15.6 \times 95\text{mm}$
4526737291994	[逆止弁孔径8.5mm]
包装形態	
1箱5本入り、1本毎ピールパック包装、EOG滅菌済	

イージー E・Z アクセス

リデューサ 一般医療機器
医療機器届出番号：20B1X00005000030



用途 単孔式内視鏡下手術および小切開を行う腹腔鏡下手術に使用

- ラッププロテクターに装着でき、任意の位置にトロカールを配置することができます。ラッププロテクターより取り外しができ、臓器の取り出しが容易です。また、再装着できます。
- 「正円タイプ/楕円タイプ」を用意。最小1.5cm-最大5cmの皮切に対応。

仕様

製品コード	製品名・規格	対応ラッププロテクター（規格）
29150510	E・Zアクセス ラッププロテクター FF07用	FF0707,FF0707L,FF0706S
29150520	E・Zアクセス ラッププロテクター FF0504用	FF0504,FF0504L
29150530	E・Zアクセス ラッププロテクター FF1010用	FF1010,FF1010M
29150540	E・Zアクセス ラッププロテクター FF07D用	FF0707D
29150560	E・Zアクセス ラッププロテクター FF0504D用	FF0504D,FF0504SD,FF0504LD

包装形態

1箱2セット、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

※本製品は、ラッププロテクターと併用し使用します。必要なサイズをご用意して下さい。

イージー E・Z トロッカー 5mm スマートインサクション

管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ
医療機器認証番号：225ADBZX00051000



用途 内視鏡外科手術におけるトロッカーとして使用
5mm鉗子対応

- 「ガスポート* / 気腹ポート付（二方活栓）」タイプの2種類を用意。

*）ガスポートタイプ
気腹・排煙チューブとの接続も可能です

仕様

製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ	付属品	包装形態
29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個	1箱5本入、 EOG滅菌済
29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm	内筒 1本 外筒 2本	スマートディスク 2個	
29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個	1箱5本入、 EOG滅菌済
29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個	
29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個	1箱5本入、 EOG滅菌済
29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm	内筒 1本 外筒 1本	スマートディスク 1個	

関連製品

E・Z トロッカースマートインサクション 部品：スマートディスク（製品コード：29170200 1箱6個入）

ラッププロテクター™ LAPROTECTOR™

単回使用開創器 管理医療機器
医療機器承認番号：21900BZX00940000



用途 小切開手術における切開創の開創および創縁保護器具として使用

- 素材の張力によって切開創を開口させるため、比較的広い術野を得ることができます。

仕様

製品コード	タイプ	腹壁等の厚さ	皮切の大きさ	切開創の大きさ
29150150	FF0707 ミニタイプ	5cm以下	2cm~4cm	3cm~4cm
29150430	FF0707L ミニセミロング	4cm~8cm	2cm~4cm	3cm~4cm
29150450	FF0707D ミニ楕円タイプ	5cm以下	2cm~4cm	3cm~4cm
29150300	FF0706S Sタイプ	皮膚用	3.5cm	3.5m
29150160	FF0504 ミニミニタイプ	5cm以下	1cm~2cm	1cm~2cm
29150460	FF1010 100mmタイプ	5cm以下	3cm~6cm	4cm~6cm
29150180	FF0504D ミニミニ楕円タイプ	5cm以下	1cm~2cm	1cm~2cm
29150400	FF0504SD ミニミニS楕円タイプ	2cm以下	1cm~2cm	1cm~2cm
29150470	FF0504L ミニミニセミロングタイプ	4cm~8cm	1cm~2cm	1cm~2cm
29150480	FF0504LD ミニミニセミロング楕円タイプ	4cm~8cm	1cm~2cm	1cm~2cm
29150490	FF0707LD ミニセミロング楕円タイプ	4cm~8cm	2cm~4cm	3cm~4cm
29150190	FF1010M 100mmミディアムタイプ	5cm以下	3cm~6cm	4cm~6cm

包装形態

1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済