

\*\* 2017 年 6 月 改訂（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）  
\* 2005 年 12 月 改訂（第 2 版）

医療機器承認番号 : 15800BZZ00333000

機械器具 74 医薬品注入器  
管理医療機器 注射筒用フィルタ 15283000

## ファインフィルターF

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【使用上の注意】

#### 〔重要な基本的注意〕

- ・包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意すること。

### 【形状・構造及び原理等】

＜本品の基本構成＞



### 【保管方法及び有効期間等】

#### 〔保管方法〕

水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

#### \*\*〔使用期限〕

箱の使用期限欄を参照のこと。〔自己認証による〕

| *型式  | *異物除去率        |      |
|------|---------------|------|
| F72  | 30 $\mu$ m 以上 | 100% |
| F108 | 10 $\mu$ m 以上 | 99%  |
| F162 | 10 $\mu$ m 以上 | 99%  |
| F194 | 5 $\mu$ m 以上  | 99%  |

### \*【製造販売業者及び製造業者の名称又は名称等】

#### 〔製造販売元〕

フォルテ グロウ メディカル株式会社

電話番号：0283-22-2801

### 【使用目的又は効果】

- ・異物濾過を目的として使用する。
- ・本品は滅菌済みであるので、そのまま直ちに使用できる。

### 【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装から取り出す。
2. 輸液セットのタコ管又は、濾過する薬液等の入った注射器の先端ルアー部等に本品を接続する。
3. 本品のキャップをはずし、注射針を接続する。
4. 注射針が上を向くように垂直に持ち、2～3 滴液が出るまで操作し、フィルター内の空気を徐々に追い出してから使用する。

### 〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・すべての操作は、無菌的に行うこと。
- ・粘度の高い薬液や血液、血液製剤等には、使用しないこと。