

# は もる 歯 守 くん II

気管挿管用前歯保護デバイス (医療用雑品)


blakko®

## 【使用上の注意】

- ☆ 本品は滅菌済みです。
- ☆ 1回限りで再度のご使用はおやめ下さい。
- ☆ 本品は、60℃以上で変形する恐れがありますので、保管に注意して下さい。
- ・ 本品は、気管挿管時に喉頭鏡から上顎前歯を保護するための保護具です。それ以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 本品を使用している場合、過度な力を加えた場合には、歯を損傷する恐れがあります。
- ・ 本品は成人用に設計されていますが、しっかり固定できない場合は使用しないで下さい。
- ・ 気管チューブ挿管後には、直ちに本品を取り外して下さい。
- ・ 包装が破損、汚損している場合や、製品に異常が見られる場合は使用しないで下さい。
- ・ 水ぬれ、直射日光、高温多湿を避けて保管して下さい。
- ・ 製品の仕様は改良のために予告なく変更することがあります。

## 【製品の形状・構造及び原理】

本品は、上顎の前歯から第1大臼歯程度に装着し、気管挿管時に喉頭鏡から上顎前歯を保護するために使用します。

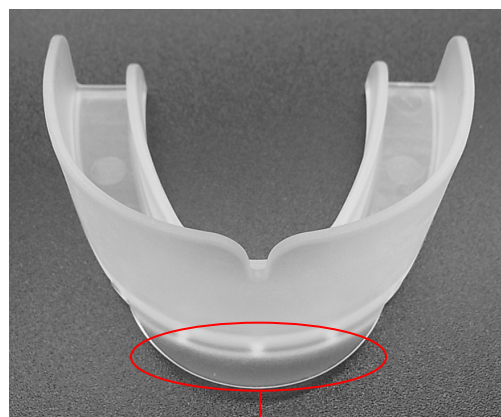

上唇保護用鏝

## 【使用方法】

- 1 患者の口を開け、上顎の前歯から第1大臼歯程度に本品をセットします。  
上唇と上顎前歯でしっかり本品を挟み込みむように装着します。
- 2 製品を上顎の歯にしっかりと押さえ付け、装着性を確認して下さい。
- 3 装着性に問題なければ、通常通り気管挿管を行ないます。



- 4 気管チューブ挿管後には、本品を取り外して下さい。

製造販売：株式会社八光 長野県千曲市大字磯部 1490

販売窓口：東京都文京区本郷三丁目 42 番 6 号 ……TEL 03(5804)8500

2011 年 11 月 21 日作成