

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001

高砂スライド式鉗子

【警告】

1. 本品表面に衝撃や振動を用いて印を刻み込む等の二次加工はしないこと。（折損の原因となるため）
2. 本品を変形あるいはキズをつける等の粗雑な取扱い及び改造を行わないこと。（器具器械の寿命を著しく低下させるため）
3. 全ての手術器具は、使用によって受ける反復的応力により疲労にさらされる。明らかな疲労が見られる場合には使用せずに新しいものと取り換えること。（様々な不具合の原因になると考えられるため）

【禁忌・禁止】

1. 本品を使用目的以外に使用しないこと。（誤った使用方法是本品の破損の原因となるため）

【形状・構造及び原理等】



（写真は製品の例を示す）

組織・体液に接触する部分の原材料：ステンレス鋼

【使用目的、効能又は効果】

本品は、臓器、組織、又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫、又は支持するために用いる再使用可能な手術器具である。

【操作方法又は使用方法等】

・洗浄・滅菌方法の代表例

以下に洗浄・滅菌方法の代表例を示したが、洗浄・滅菌に当たっては院内の規定に従うこと。

1. 洗浄方法代表例

- (1) 製造元の指示に従い、中性洗剤を準備する。
- (2) 柔らかい毛のブラシあるいは柔らかく清潔な布で、洗浄液に浸したまま手で本品を洗浄する。溝部分などは念入りにブラシで洗浄する。
- (3) 温水で少なくとも1分以上流し、十分すすぐ。
- (4) 洗浄後、目視にて血塊等がないことを必ず確認する。
- (5) 清潔な柔らかい布を用い、完全に水気を取る。

2. 滅菌方法代表例（滅菌条件）

本品は出荷時、未滅菌であるため、使用時及び再使用時には適切な方法で洗浄し、以下の条件又は各医療機関で検証された条件により高圧蒸気滅菌を行い、滅菌後の無菌性の保証については、各医療機関にて行うこと。

高圧蒸気滅菌（日本薬局方／微生物殺滅法）

115～118℃	30分間
121～124℃	15分間
126～129℃	10分間

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品の先端部は特に取り扱い、洗浄・滅菌方法、保存状態によって、腐食、損傷、破損、搔きキズなどを生じさせるおそれがあるので注意すること（ステンレス鋼は錆びにくい金属だが、保存状態によっては錆が発生することがある）。また、異常が見られる状態（腐食、ひび、欠け、曲り、磨耗）では使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

乾燥した場所に室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・本品を酸又はアルカリにさらさないこと。
- ・日常点検及び使用前点検を行い、正常に作動していることを確認すること。
- ・本品は使用の度に洗浄すること。血液や残片物を取り除き、全て十分に洗浄されているかを確認すること。また、洗浄時に他の器具との接触による損傷をさせないように配慮すること。
- ・洗浄後は直ちに乾燥させ、湿った状態で必要以上に長時間放置することは避けること。
- ・本品が漂白剤、消毒液等の塩素及びヨウ素を含む溶液にさらされた場合には、直ちに清水で洗浄すること。
- ・形状材質変形防止のため極度の高温熱源接近は避けること。
- ・鉗子先端が鋭利な形状のものもあり手術用ゴム手袋等の破損及び顔面等への事故には気をつけること。

この添付文書は、本品を安全にご使用いただくためのものです。
この添付文書をよくお読みになり、内容を十分ご理解された上で
ご使用ください。

【包装】1本/袋

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

〔製造販売業者〕

高砂医科工業株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 3-42-2

お問い合わせ窓口：

TEL:03-3815-0156 FAX:03-3815-5361