

ディスポーザブル

吸引細胞穿刺針

医療機器承認番号：20100BZZ00833000

バイオサック

適 応

乳腺、甲状腺、リンパ節などの腫瘍の細胞生検




特 長

- 先端部のサイドホールによって、効果的な細胞採取が可能です。
- 吸引筒は、軽量でコンパクトです。吸引操作はワンハンドで行えます。
- 手技が迅速・確実に行え、比較的小さい目標部位の穿刺吸引が可能です。

- ・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
- ・注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

使用方法

1. 体表より触知する腫瘍を中心に広く消毒し、腫瘍を手指で固定する。
2. 腫瘍の性状から最も“悪性”が疑われる部位を直接穿刺する。（写真1）
3. 吸引筒プランジャーを一気に引き上げ、強い陰圧を約3秒間加える。（写真2）
4. ゆっくりプランジャーを戻し、陰圧を解除した後、再び穿刺方向を変え、再び吸引筒プランジャーを一気に引き上げ、強い陰圧を約3秒間加える。
5. 静かにプランジャーを戻し、陰圧を解除した後、再び穿刺針の方向を変え、4)と同様に陰圧を加える。
6. 陰圧、陽圧の操作を2～3回繰り返した後、陰圧を加えたままゆっくり穿刺針を引き抜く。（※注 この際、完全にプランジャーを引いた状態でなく、1～2ml引ける分を残して抜く。）
7. 最初に1～2ml分で生理食塩水を吸引する。その後、静かに吸引筒内の空気を押出した後、生理食塩水5mlを吸引して内筒を満たす。（写真3）
8. 採取した細胞成分を吸引筒内へ取り込み、すみやかに病理検査室へ提出する。（写真4）
9. 腫瘍穿刺部位を消毒し、簡易絆創膏で同部を被覆する。

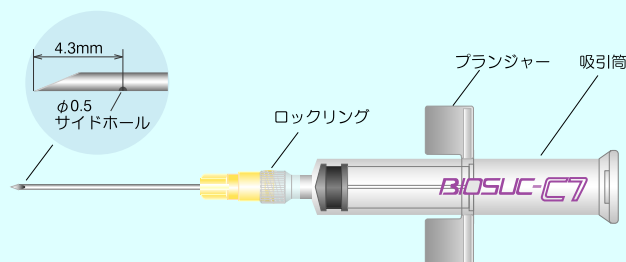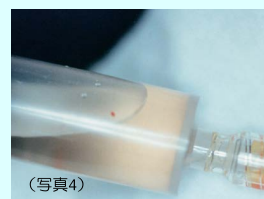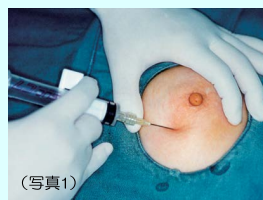

仕 様

製品コード	サイズ
22030500	20G×50mm
22030510	20G×100mm
22030520	21G×50mm
包装形態	
1箱10本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済	