

# キャットハンド

10/12mm用



## 用途

内視鏡下手術時の臓器圧排・癒着剥離


## 特長

- 先端バルーンによるソフトな圧排・剥離操作が可能です。
- バルーン外周の不織布材が、滑り止めの効果を発揮します。
- 扁平状のバルーンで操作性が向上しています。10/12mmトロカールより挿入が可能です。

医療機器届出番号：20B1X00005000029  
起子 一般医療機器


本製品を使用する際には必ず製品に添付している添付文書をお読み下さい。  
添付文書には使用方法及び禁忌・禁止事項が記載されております。

### リトラクター本体

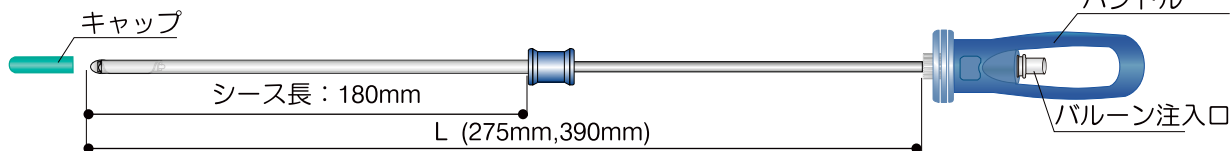

付属品  
通気アダプター 1個

### バルーン拡張時

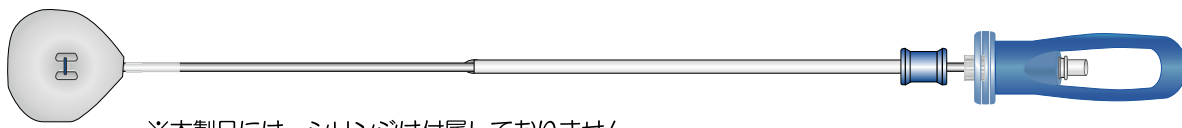

※本製品には、シリンジは付属しておりません。

・20mL以上の中ロタイプのシリンジは、本品に接続できません。

注1) バルーンを膨らます際には空気を使用して下さい。

注2) バルーン拡張・収納する際には、無理な押し引きしないで下さい。

### バルーン押出・収納

押出：時計回りに回転  
収納：時計回りに回転

## 仕様

製品コード	タイプ	有効長(L)	シース長	バルーン注入量	ハンドルカラー	付属品
29111650	10mm レギュラー/ハード	390mm	180mm	20mL~22mL	青	通気アダプター 1個
29111660	10mm ショート / ハード	275mm		17mL~19mL		
29111670*	10mm レギュラー/ソフト	390mm	180mm	20mL~22mL	白	通気アダプター 1個
29111680*	10mm ショート / ソフト	275mm		17mL~19mL		

## 包装形態

\*) は受注生産となります。最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

1箱2セット入、1セット毎ピールパック包装、EOG滅菌済

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500  
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8520 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100  
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806  
柏 ☎(04)7147-8500 金沢 ☎(076)253-8500 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター  
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

## 製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部



〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地