

内視鏡下吸引生検針 エンド・ソノプシー

ENDOSONOPSY 医療機器承認番号：20700BZZ00817000



適 用

内視鏡下の吸引生検

特 長

- 保護チューブとインナーチューブにメッシュ入りチューブを使用していますので、穿刺の際の手元操作が的確に穿刺針に伝わります。
- 手元操作でスライド（穿刺針の突出）、ロック（穿刺針の固定）が可能です。希望の穿刺深度に合わせ「10mm／25mm」と突出長さを調節できます。
- 保護チューブが穿刺針を保護し、また、穿刺針による内視鏡本体の損傷も防止します。
- ソノプシー^{*1}の吸引シリンジを使用していますので、吸引操作が片手で行えます。

^{*1}：八光超音波ガイド下生検針 ソノプシーC1

black[®]

管理医療機器 単回使用吸引用針

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

内視鏡下吸引生検針 ENDOSONOPSYTM エンド・ソノプシー

使用方法

1. 穿刺針を保護チューブに収納した状態で、内視鏡の鉗子孔に、保護チューブ先端が、内視鏡または超音波映像下に確認できる位置まで挿入してください。
*挿入する前に、内筒基ピンがA位置（スライドロック）にあることを確認してください。

2. 穿刺針が臓器に接触しないように注意しながら、外筒基（青）のスリットに沿って内筒基（白）を前進させ、保護チューブより穿刺針を希望の穿刺深度（10mmまたは25mm）に合わせ突出させます。

スライド
B'位置
穿刺針突出長:10mm
スライド
B位置
穿刺針突出長:25mm
内筒基を軽く右に回し、穿刺針を固定してください。
*この操作により、内筒基のロックピンはBまたはB'の位置にしてください。
3. 穿刺針先端を内視鏡または超音波映像下に確認できる位置に移動させます。

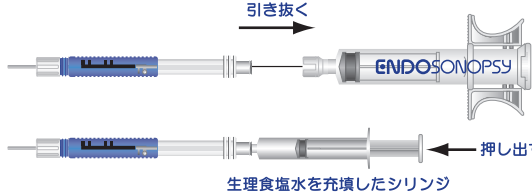
4. 映像下に穿刺目標を定め、目標部位が最も鮮明に抽出される位置で、穿刺針の目盛りまたは針先エコーを観察しながら、穿刺針が目標部位にわずかに入る位置まで刺入させます。

5. 吸引ピストンをロックされるまで引き、先端に陰圧が伝わるまで数秒間保持してください。


6. 素早く穿刺針を押し進め、目標部位を貫通させ、さらに、目標部位を数往復穿刺してください。

7. 生検終了後、穿刺針を目標部位より抜去し、吸引筒のロックリングをゆるめ陰圧を解除してください。

8. 外筒基（青）のスリットに沿って内筒基（白）をA位置までスライドさせ、穿刺針を保護チューブ内に収納してください。その後、内視鏡より抜去してください。
*内視鏡より抜去する前に、内筒基のロックピンがA位置（スライドロック）にあることを確認してください。

9. 組織の取り出し
ロックリングをゆるめ、吸引筒ごと内針を引き抜いてください。次に内筒基に生理食塩水を充填したシリンジを装着し、穿刺針内の組織片を押し出します。


生検採取のテクニック

症例により、以下の手技により採取率が向上する場合があります。
4.の後、吸引ピストンを引くと同時に、穿刺針を押し進め目標部位を貫通させ、先端に陰圧が伝わるまで数秒待ち、さらに、目標部位を数往復穿刺する。その後は7.に続く。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

参考文献・原田 昇、浅野 武秀、神津 照雄ほか：胃癌におけるEUS 消化器科 24 (3) : 303-307,1997
・有馬 美和子、原田 昇、神津 照雄ほか：上部消化管疾患に対する超音波内視鏡ガイド下穿刺生検法 消化器内視鏡 Vol.11 No.1 : 91-100,1999

各部の名称



仕様

製品コード	穿刺針サイズ	保護チューブサイズ	包装形態
22033010	0.8 (21G) × 10-25mm	Φ1.8mm × 1,600mm	1箱1セット入り、1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)954-2111 名古屋 (052)914-8500 福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地