

管理医療機器 吸引用子宮カテーテル
医療機器認証番号：224ADBZX00080000

エンドサクション



適応

子宮内膜スクリーニング


特長

- 子宮内膜スクリーニングとして、簡便に使用でき、確実な組織採取ができます。
- 柔軟で挿入が容易です。屈曲した状態でも適度にフィットします。
また、安全性と正確性を考えたメモリ付です。
- 先端は『オープンエンド/クローズドエンド』の2タイプを用意。
お好みによりタイプをお選びください。


オープンエンドタイプ（サイドホール2ヶ）
クローズドエンドタイプ（サイドホール1ヶ）

参考文献

国立病院機構 長崎医療センター 産婦人科 安日 一郎先生
“エンドサクションによる子宮内膜組織サンプリング”
※資料については、最寄りの支店・営業所へお問い合わせください。

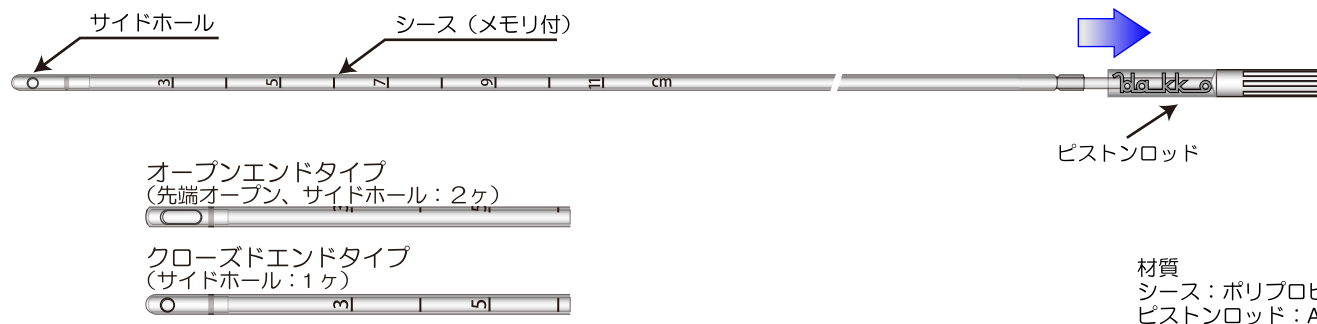

材質
シース：ポリプロピレン
ピストンロッド：ABS樹脂

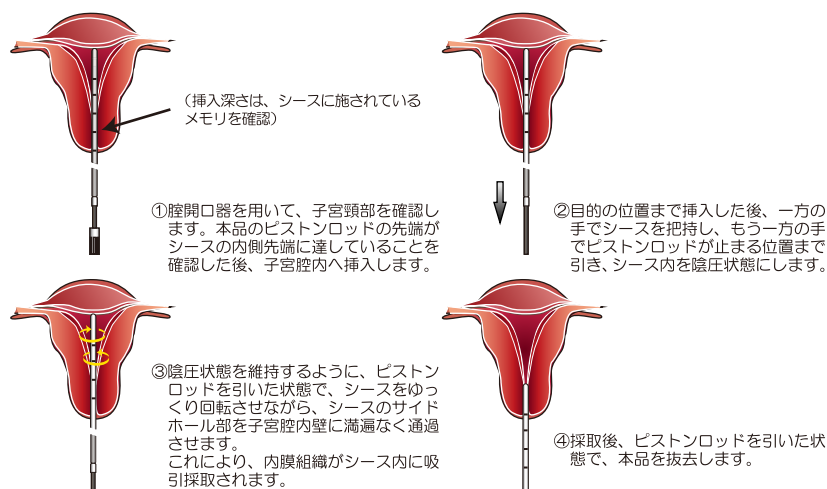

【組織の取り出し】

- 1) オープンエンドタイプ
ピストンロッドを押し、シース内の組織を押し出します。
- 2) クローズドエンドタイプ
シースの先端を滅菌されたハサミで切断した後、ピストンロッドを押し、シース内の組織を押し出します。

仕 様

製品コード (JANコード)	規格
22611010 (4526737224053)	オープンエンドタイプ 2.5×3.0×250mm
22611020 (4526737224060)	クローズドエンドタイプ 2.5×3.0×250mm
包装形態	
1箱10本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済	

・本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。