

イー・ジー E・Z アクセス

製造販売届出番号：20B1X00005000030
一般医療機器 リデュース



適 応

単孔式内視鏡下手術 および
小切開を行う腹腔鏡下手術に使用

特 長

- ラッププロテクターに装着でき、任意の位置にトロカールを配置することができます。
- ラッププロテクターより取り外しができ、臓器の取り出しが容易です。また、再装着できます。
- 『正円タイプ/楕円タイプ』を用意。最小1cmの皮切から最大6cmの皮切に対応できます。
- 複数本のトロカールを配置した場合にも、トロカール同士の干渉がほとんどありません。




写真提供
社会福祉法人
京都社会事業財団 西陣病院

【構造図】


正円タイプ




楕円タイプ

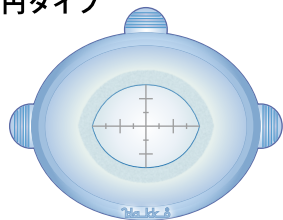

材質：シリコンゴム

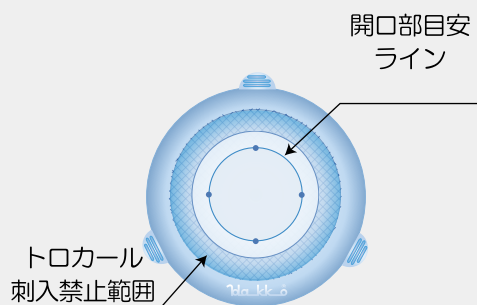

開口部目安ラインより内側を目安にし、
トロカールを刺入して下さい。

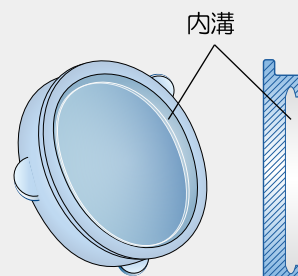

本製品をラッププロテクターに装着する
際には、確実に内溝内に嵌め込んで下さい。

※本製品は、ラッププロテクターと併用します。
必要なサイズをご用意ください。

【注】

プラスチックブレード以外のトロカールは使用しないでください。
破片等が体腔内に脱落する恐れがあります。

仕 様

製品コード (JANコード)	製品名・規格	対応ラッププロテクター (規格)
29150510 (4526737291789)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF07用	FF0707, FF0707L, FF0706S
29150520 (4526737291796)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF0504用	FF0504, FF0504L
29150530 (4526737291949)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF1010用	FF1010, FF1010M
29150540 (4526737291956)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF0707D用	FF0707D, FF0707LD
29150560 (4526737292151)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF0504D用	FF0504D, FF0504SD
29150570 (4526737292403)	E・Zアクセス ラッププロテクター FF1010HD用	FF1010HD
包装形態		
1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済		

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

E・Zアクセスは、ラッププロテクターに装着し単孔式内視鏡下手術等に使用する専用器具です。
(必要なサイズのラッププロテクターを別途ご用意ください。)

【使用方法】

○気腹用トロカールの配置

1. 本品の透明部分の開閉口目安ラインより内側を目安にし、任意の位置にトロカールを刺入します。(図1)
刺入する深さはラッププロテクターの上リングから臓器までの距離を測り、トロカール先端が臓器を損傷しない距離までとします。

注) プラスチックブレード以外のトロカールは使用しないで下さい。
(破片等が体腔内へ脱落する恐れがあります。)

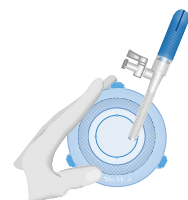


図1

○装着

2. 配置したトロカールの内筒を抜き、トロカールの先端がラッププロテクターならびに臓器に接触しないよう注意し、予め腹部に装着されているラッププロテクターの上リングを全周にわたって本品の内溝に嵌め込みます。(図2、3)

※ラッププロテクターを使用する際には、腹壁等の厚さに準じたサイズを選択して、製品の注意事項等情報(電子添文等)を必ずご確認の上、装着させて下さい。

注) 本製品をラッププロテクターに装着する際には、確実に内溝へ嵌め込んで下さい。
(気腹ガス漏れ及び本製品がラッププロテクターから脱落する恐れがあります。)

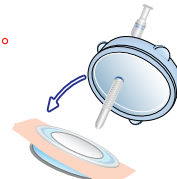


図2

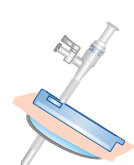


図3

○気腹

3. 配置したトロカールの気腹ルートより気腹を開始する。気腹ガスの漏れがないことを確認し、気腹ガスの漏れが生じた場合には、再度装着を確実に行って下さい。

○10/12mmトロカールの配置

4. 一旦気腹を解除し、トロカール先端がラッププロテクター及び臓器に接触しないよう注意しながら、本製品を取り外します。
配置されている5mmトロカールを抜き、その開孔口へ10/12mmトロカールを刺入します。

●本カタログは、製品の紹介を目的として作成されています。
本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。

関連製品

E・Zトロッカー^{5mm}スマートインサクション 医療機器認証番号：225ADBZX00051000
管理医療機器 単回使用トロカールスリーブ

仕様							
製品コード	規格	型式	有効長	組み合わせ		付属品	包装形態
29170700	ロング・シングル・ガスポートタイプ	SG951-V12	95mm	内筒 1本	外筒 1本	スマートディスク 1個	1箱5セット入 1セット毎 ピールオープン包装 EOG滅菌済
29170720	ショート・シングル・ガスポートタイプ	SG701-V12	70mm				
29170710	ロング・ツイン・ガスポートタイプ	SG952-V12	95mm	内筒 1本	外筒 2本	スマートディスク 2個	
29170730	ショート・ツイン・ガスポートタイプ	SG702-V12	70mm				
29170740	ベリーショート・シングル・ガスポートタイプ	SG501-V12	50mm	内筒1本	外筒1本	スマートディスク1個	
29170320	ロング・シングル・活栓付	S951-CV12	95mm	内筒 1本	外筒 1本	スマートディスク 1個	
29170520	ショート・シングル・活栓付	S701-CV12	70mm				
関連製品							
E・Zトロッカースマートインサージョン 部品：スマートディスク（製品コード：29170200 1箱5個入）							



関連製品

E・Zトロッカースマートインサクション 部品：スマートディスク (製品コード：29170200 1箱5個入)

LAPPROTECTORTM

医療機器認証番号：21900BZX00940000
管理医療機器 単回使用開創器

仕様					「※」は準規格品です。
製品コード	タイプ	体壁の厚さ	皮切の大きさ	切開創の大きさ	
29150150	FF0707 ミニタイプ	5cm以下	2cm～4cm	3cm～4cm	
29150430	FF0707L ミニセミロングタイプ	4cm～8cm	2cm～4cm	3cm～4cm	
29150450	FF0707D ミニ楕円タイプ	5cm以下	2cm～4cm	3cm～4cm	
29150300	FF0706S Sタイプ（甲狀腺用）	2cm以下	3.5cm	3.5m	
29150160	FF0504 ミニミニタイプ	5cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm	
29150460	FF1010 100mmタイプ	5cm以下	3cm～6cm	4cm～6cm	
29150180	FF0504D ミニミニ楕円タイプ	5cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm	
29150400*	FF0504SD ミニミニS楕円タイプ	2cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm	
29150470*	FF0504L ミニミニセミロングタイプ	4cm～8cm	1cm～2cm	1cm～2cm	
29150490*	FF0707LD ミニセミロング楕円タイプ	4cm～8cm	2cm～4cm	3cm～4cm	
29150190	FF1010M 100mmミディアムタイプ	5cm以下	3cm～6cm	4cm～6cm	
29150630	FF1010HD 100mm H楕円タイプ	5cm以下	3cm～6cm	4cm～6cm	
包装形態					
1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済					

