


臓器収納袋

一般医療機器 組織収納サック

E・Zパース



E・Z PURSE

製造販売届出番号：20B1X00005000007

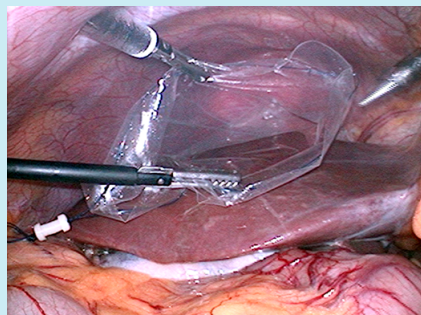

用途

内視鏡下外科手術における摘出臓器回収

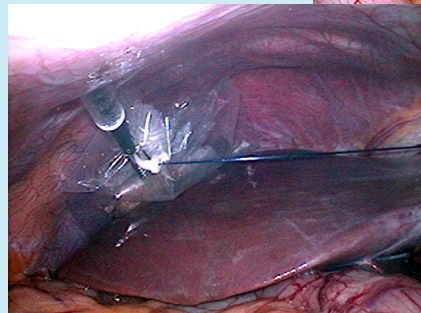
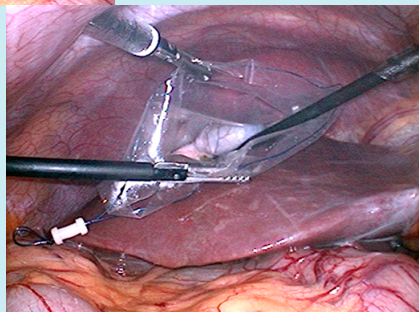
写真提供：東北労災病院
外科部長 徳村先生

特長

- フラットな状態で包装されていますので、巻き癖がありません。そのため腹腔内での操作が容易に行えます。
- シンプルな形状で、どのような症例でも対応できます。
- コストパフォーマンスに優れています。

<使用方法>


1. 包装から取り出したパースをシール部より筒状に巻いてください。
2. 筒状に巻いたパースのストッパーの反対側を鉗子で把持し、そのままの状態でもロックに挿入してください。
(10/12mm)
3. 間口を鉗子で開けて臓器を収納し、ストッパーをスライドさせ間口を閉じてください。
4. 適切な方法で体外へ取り出してください。

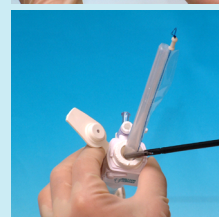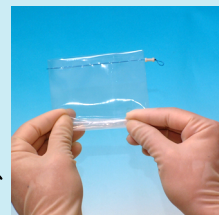


(詳しくは、医療機器添付文書に記載されています。)

- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。
- ・医療機器添付文書には、製品の使用方法、使用上の注意などの重要な情報が記載されています。


●レギュラータイプ

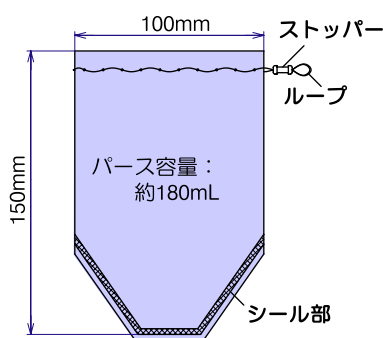

●ラージタイプ

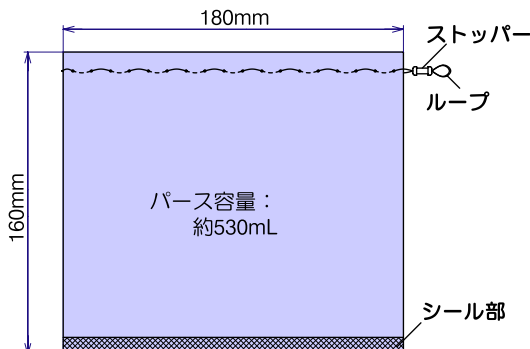

●ロングタイプ

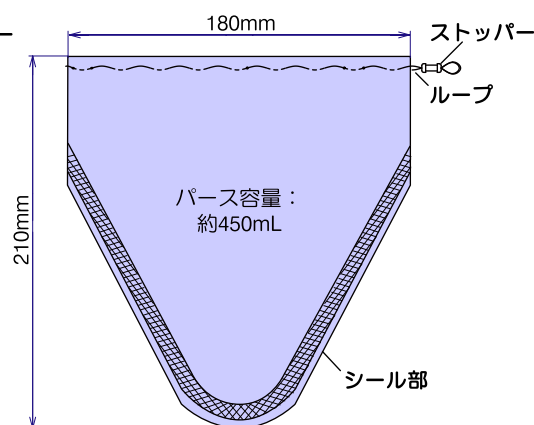

仕 様

製品名	製品コード	タイプ	サイズ	パース容量
E・Zパース	29110870	レギュラータイプ	100mmX150mm	約180mL (最大)
	29110880	ラージタイプ	180mmX160mm	約530mL (最大)
	29110890	ロングタイプ	180mmX210mm	約450mL (最大)

包装形態

1箱10枚入り、1枚毎ピールオープン包装、E O G滅菌済