

ラッププロテクター™

LAP PROTECTOR™

医療機器承認番号：21900BZX00940000

単回使用開創器 管理医療機器



特長

- 素材の張力によって切開創を開口させるため、比較的広い術野を得ることができます。
- 切開創全体に比較的均一に力が加わり、開創による組織の挫滅や損傷を起こしにくい状態で開口させることができます。
- 切開創に密着するため、創感染を起こしにくく、切除臓器と腹壁との接触を防止できます。

blacko®


心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

LAP PROTECTORTM ラッププロテクターTM

FFタイプ


フレキシブルリング

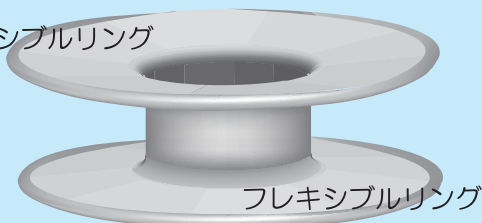

フレキシブルリング

HFタイプ

ハードリング

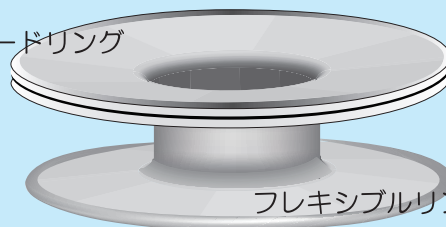

フレキシブルリング

材質：シリコンゴム

使用方法

<装着準備>


- ・下リングの一部を反転させて持ち上げ、上リングの中を通して上に出し、ハイヒール（右図）のような形にします。

<装着>

- ・ハイヒールのような形になった下リングの下側先端を切開創へ挿入し、腹壁の前側に密着させながら、創内にゆっくり押し広げます。
- ・最後に下リングの後端部を反転させるように創内に挿入します。

<取り外し>

- ・開創部から指先を入れ、腹腔内にある下リングの一部をつかみ、創から取り出します。
- 指先が届かない場合には、開創部から筋鉤等で下リングの一部を引っ掛け、腹膜を傷つけないように取り出します。

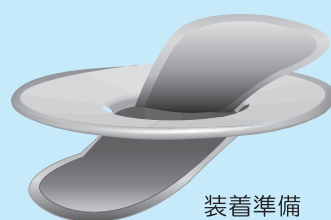

装着準備

タイプと腹壁等の厚さと皮切および切開創の大きさの目安


型式（製品ｺｰﾄﾞ / JANｺｰﾄﾞ）	サイズ	腹壁等の厚さ	皮切	切開創の大きさ	
FF0504U (29150170/4526737291178)	Φ50×Φ40mm	5cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm	
FF0504 (29150160/4526737290829)	Φ50×Φ40mm				
FF0707 (29150150/4526737290782)	Φ70×Φ70mm		2cm～4cm	3cm～4cm	
FF0707D (29150450/4526737291253)					
HF0707 (29150250/4526737290812)					
FF1010 (29150460/4526737291161)	Φ100×Φ100mm		5cm以下	3cm～6cm	4cm～6cm
FF1210 (29150110/4526737290775)	Φ120×Φ100mm				
HF1210 (29150210/4526737290805)				Φ120×Φ120mm	5cm～8cm
FF1212 (29150100/4526737290768)					
FF1515 (29150120/4526737290959)	Φ150×Φ150mm		8cm～12cm	10cm～12cm	
FF0707L (29150430/4526737291345)	Φ70×Φ70mm×40mm	4cm～8cm	2cm～4cm	3cm～4cm	
FF1210L (29150420/4526737291239)	Φ120×Φ100mm×40mm		3cm～6cm	4cm～6cm	
FF1212L (29150410/4526737291222)	Φ120×Φ120mm×40mm		5cm～8cm	6cm～8cm	
FF1212LL (29150440/4526737291246)	Φ120×Φ120mm×70mm		7cm～12cm	5cm～8cm	6cm～8cm

包装形態


1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

FFタイプ


タイプ：レギュラー

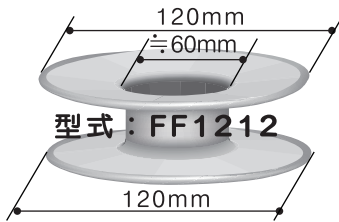

タイプ：レギュラー100mm

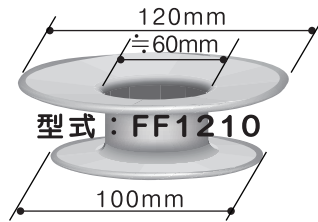


タイプ：ラージ

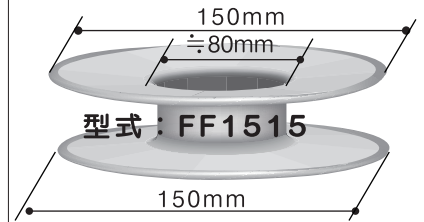


FFタイプ

FFロングタイプ


タイプ：100mmタイプ

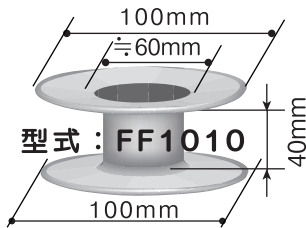

タイプ：セミロング

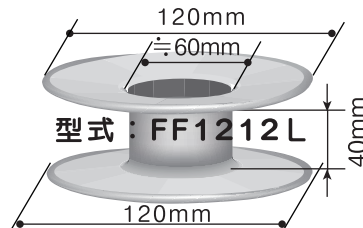


タイプ：セミロング100mm

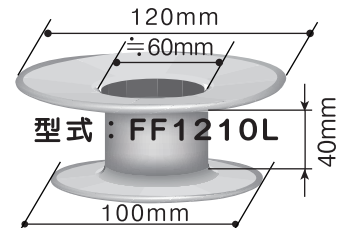


FFロングタイプ

FFミニ楕円


タイプ：ロング

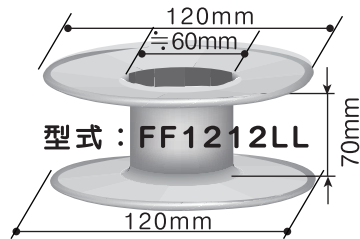

タイプ：ミニセミロング

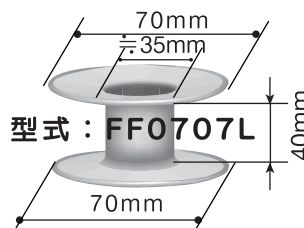


タイプ：ミニ楕円

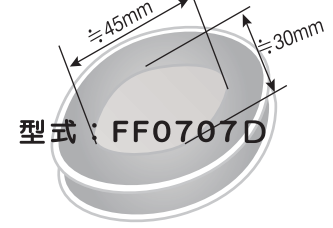


FFミニタイプ


タイプ：ミニ

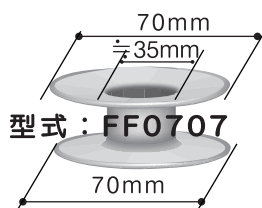

タイプ：ミニミニ

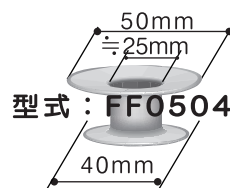

タイプ：ウルトラミニ

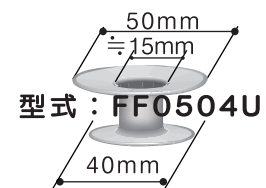


(メジャーは付属していません。)


(メジャーは付属していません。)

HFタイプ


タイプ：レギュラー

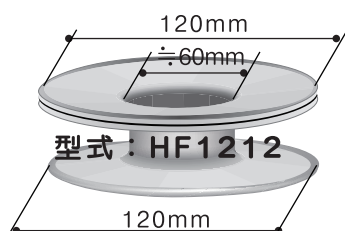

タイプ：レギュラー 100mm

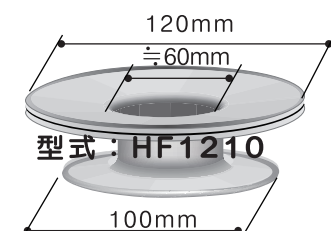

タイプ：ミニ

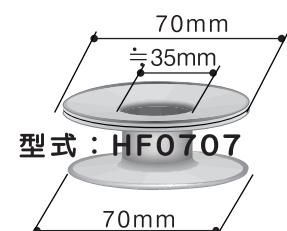

医療機器承認番号：21900BZX00940000
単回使用開創器 管理医療機器



LAP PROTECTORTM ラッププロテクターTM

用途

小切開手術における切開創の開創
および創縁保護器具として使用。

特長

- 素材の張力によって切開創を開口させるため、比較的広い術野を得ることができます。
- 切開創全体に比較的均一に力が加わり、開創による組織の挫滅や損傷を起こしにくい状態で開口させることができます。
- 切開創に密着するため、創感染を起こしにくく、切除臓器と腹壁との接触を防止できます。

製品コード:29150180
タイプ:ミニミニ楕円タイプ
型式:FF0504D

製品コード:29150400
タイプ:ミニミニS楕円タイプ
型式:FF0504SD

製品コード:29150470
タイプ:ミニミニセミロングタイプ
型式:FF0504L

製品コード:29150480
タイプ:ミニミニセミロング楕円タイプ
型式:FF0504LD

製品コード:29150490
タイプ:ミニセミロング楕円タイプ
型式:FF0707LD

製品コード:29150190
タイプ:100mmミディアムタイプ
型式:FF1010M

タイプと腹壁等の厚さと皮切および切開創の大きさの目安仕様

型式	(製品コード)	タイプ	腹壁等の厚さ	皮切の大きさ	切開創の大きさ
FF0504D	(29150180)	ミニミニ楕円タイプ	5cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm
FF0504SD	(29150400)	ミニミニS楕円タイプ	2cm以下	1cm～2cm	1cm～2cm
FF0504L	(29150470)	ミニミニセミロングタイプ	4cm～8cm	1cm～2cm	1cm～2cm
FF0504LD	(29150480)	ミニミニセミロング楕円タイプ	4cm～8cm	1cm～2cm	1cm～2cm
FF0707LD	(29150490)	ミニセミロング楕円タイプ	4cm～8cm	2cm～4cm	3cm～4cm
FF1010M	(29150190)	100mmミディアムタイプ	5cm以下	3cm～6cm	4cm～6cm

包装形態

1箱2個入、1個毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 NKDビル5階 ☎(03)5804-8500
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8520 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806
柏 ☎(04)7147-8500 金沢 ☎(076)253-8500 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地