

一般医療機器 臓器摘出用装具

シリコンディスク

Silicone Disc

届出番号:20B1X00005000020



用途

- 胸腔（または腹腔）鏡補助下手術の際、臓器を圧排するために使用する。

特長

- ・フレキシブルリングが変形するため、小さな切開創からも体腔内への挿入が可能です。
（小切開創の目安：2～3cm）
- ・フレキシブルリングの復元力により、シリコンゴム膜が体腔内で拡張し、広い面積の圧排が可能となり、十分な術野が確保できます。
- ・面形状のため、圧排時の臓器損傷を低減できます。
- ・臓器と電気メス等の熱源との直接接触を防止できます。

シリコンゴム膜

フレキシブルリング

材質：シリコンゴム

＜挿入方法＞

1. 本製品を細長い形状に変形させて、小切開創より胸腔（腹腔）内へ挿入します。
2. 把持鉗子で本製品の外周部（フレキシブルリング）を把持し目的の位置まで移動させます。
3. ツッペル鉗子等で本製品の中央部を押さえ、目的の臓器の圧排を行います。

＜取り出し方法＞

1. 小切開創より把持鉗子を挿入し、長径端部の外周部（フレキシブルリング）を把持し、回転させながら細長い形状に変形させて取り出します。

仕様

製品コード	規格
29111400	楕円タイプ 160x100mm
29111410	穴付楕円タイプ(大) 160x100mm-4H
29111420	穴付楕円タイプ(小) 120x80mm-4H
包装形態	
1箱2セット入り、1セット毎に個別包装 EOG滅菌済	

・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。