


ラパ口用送水・吸引キット

届出番号：09B1X00004000103

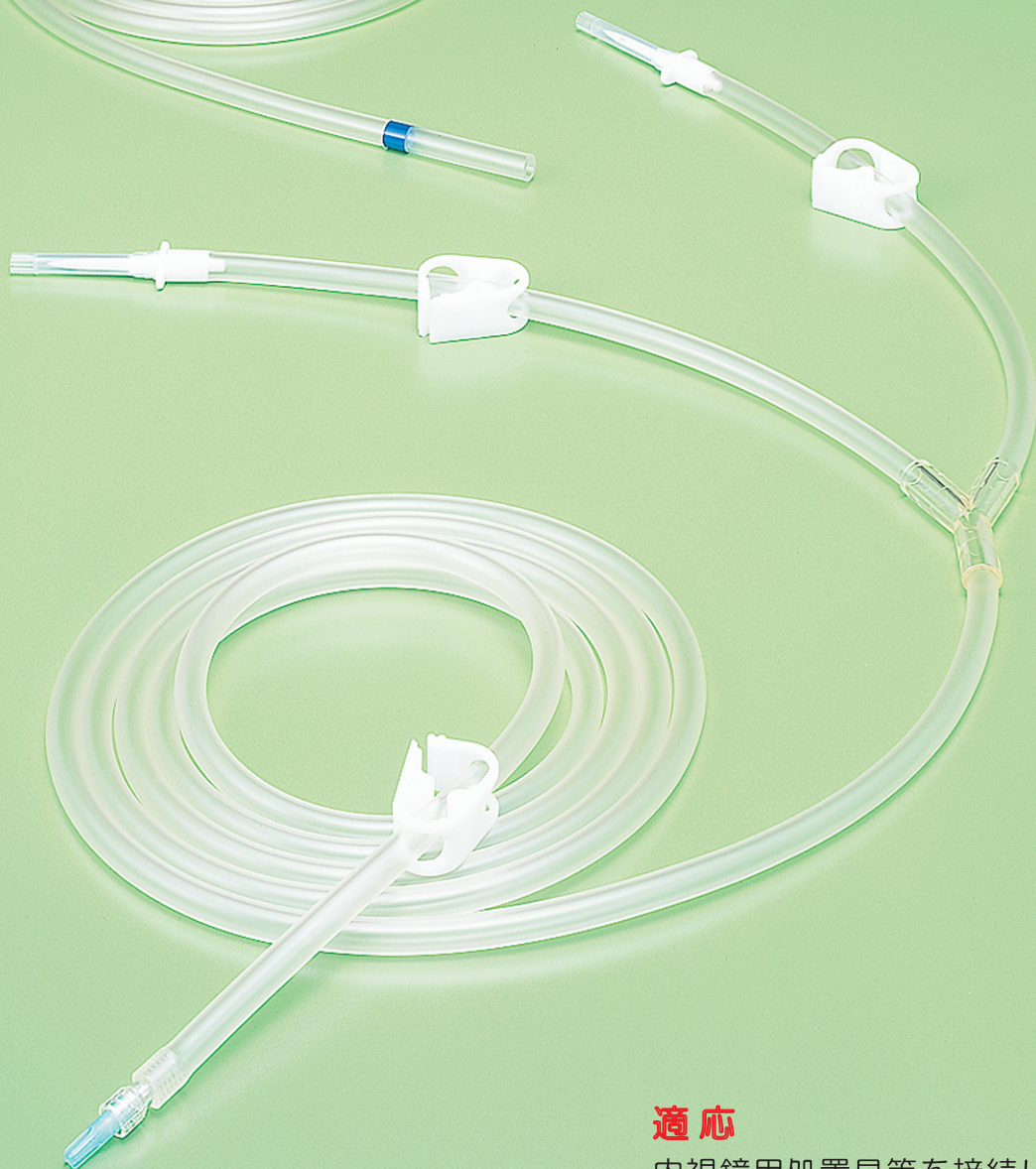

適応

内視鏡用処置具等を接続し
持続的に送水・吸引

特長

- 太いチューブにより迅速で効率的な流量が得られます。また、2個のバッグから交互、もしくは同時に液を灌流する事が出来ます。
- ワンタッチクランプにより確実に液を止めることが可能です。
- ピン針は穿刺抵抗が少ない円錐型プラスチック針を採用しており穿刺が容易に行えます。
- チューブ先端にルアーロックを使用しているため、ワンタッチで吸引・洗浄管に接続することができます。

ラパロ用送水・吸引キット

使用方法

＜使用前の準備＞

1. 必要に応じて手袋を着用し、汚染に十分注意し包装から本品を取り出す。
2. 使用前には接続する器具の径と本品の径を確認すること。
3. 接続する器具と本品をしっかりと接続する。

＜操作方法＞

1. すべてのクレンメを閉じる。
2. ピン針のプロテクターを外し、生食容器の所定の位置にまっすぐ根元まで刺通する。(図1)
(2個のバッグから交互もしくは同時に液を灌流する事も出来ます。)
3. クランプを操作して、本品の末端まで生食を満たし、空気を完全に除去し生食容器を加圧する。
4. 吸引チューブは、片方を吸引・洗浄管に接続し、もう一方を吸引器に接続する。(図2) ※洗浄吸引管の吸引チューブを接続する部分がメスアダプター対応の場合は接続出来ません。

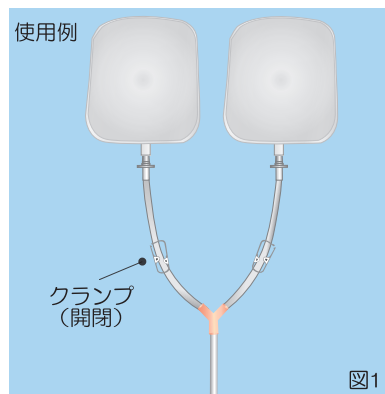


図1


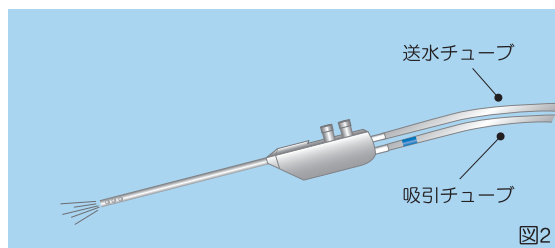


図2


仕様

規格


製品コード:38012700 JANコード:4547319150218
規格:HY-2700 S

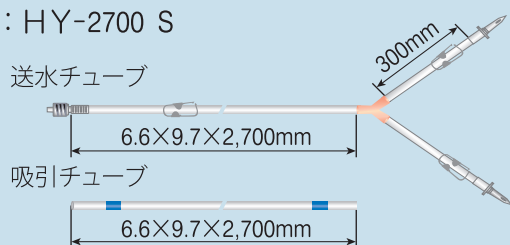


製品コード:38012730 JANコード:4547319150287
規格:HY-2700 R

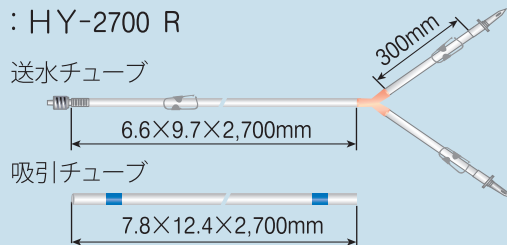

製品コード:38012710 JANコード:4547319811997
規格:HY-2700 KO

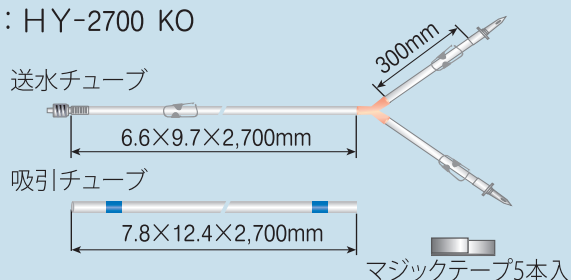

製品コード:38012740 JANコード:4547319155381
規格:HY-3000 S^(*)

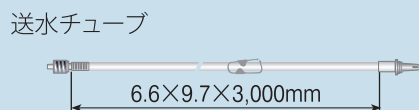

※吸引チューブは付属していません。

包装形態

1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済 (*)は1箱10セット入です。

- ・本カタログは、製品の紹介を目的として作成されていますので、ご使用になる場合には、製品に添付されている医療機器添付文書を必ずお読み下さい。
- ・医療機器添付文書には、禁忌・禁止事項、使用上の注意等の重要な情報が記載されています。