

はもるくんII

歯守くんII

気管挿管用前歯保護デバイス
(医療用雑品)

用途

- 気管挿管時の喉頭鏡による
前歯損傷保護

特長

- 救急および全身麻酔の気管挿管時に、喉頭鏡挿入時の接触から前歯を保護します。
- 安全性向上のため、上顎形状に合わせた形状となっています。
- 容易に装着ができ※、すぐに使用が可能です。また、取り外しも容易に行えます。

※患者さまの歯並びの状況によっては、必ずしもフィットしない可能性があります。

<使用方法>

1. 患者の口を開け、上顎の前歯から第1大臼歯程度に本品をセットします。
上唇と上顎前歯でしっかり本品を挟み込むように装着します。
2. 製品を上顎の歯にしっかりと押さえ付け、装着性を確認して下さい。
3. 装着性に問題がなければ、通常通り気管挿管を行ないます。



4. 気管チューブ挿管後は、本品を取り外してください。



材質：EVA（エチレン-酢酸ビニル共重合体）

仕様

製品名	製品コード（JANコード）	包装形態
歯守くんII (はもるくんII)	26270020 (4526737260860)	1箱25個入、1個毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

【使用上の注意】

- ・ 本製品は、60℃以上で変形する恐れがありますので、保管に注意してください。
- ・ 過度な力を加えた場合には、歯を損傷する恐れがあります。また、しっかり固定できない場合は使用しないでください。