

ディスポーザブル 気管内スプレーチューブ

製造販売届出番号：20B1X00005000013 喉頭・気管用麻酔薬噴霧キット 一般医療機器



適応

- 局所麻酔剤の気管内へのスプレー

特長

- 360度方向へスプレーが可能です。また、ホールの数が40ホールと80ホールの2タイプあります。
- チューブは、挿入しやすいR形状（2種類）に加工されています。
- チューブ先端は、粘膜を傷つけにくい形状に加工されています。

- ・40ホールタイプの場合、チューブとシリンジの接続は確実に行ってください。また、使用中においても常に緩みが無いことを確認してください。
- ・スプレーする場合には、シリンジのプランジャーをすばやく押してください。ゆっくり押した場合、スプレー状にはなりません。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

仕様

「*」は準規格品です。

ホールタイプ	製品コード	サイズ	包装形態
40ホールタイプ	27530210	9Fr×160mm R 80	1箱25本入り 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
	27530220	9Fr×160mm R100	
	27530310	10Fr×160mm R 80	
	27530320	10Fr×160mm R100	
	27530330	10Fr×220mm R 80 型式10-22R84	
80ホールタイプ	27530510*	9Fr×160mm R 80	
	27530520	9Fr×160mm R100	
	27530610	10Fr×160mm R 80	
	27530620	10Fr×160mm R100	

≒25mm
(40ホール)
(80ホール)

R80
R100


80ホールタイプは、
接着されています。

シリンジ：5ml

付属シリンジの薬液充填方法

<40ホールタイプの場合>

1. あらかじめ決定した局所麻酔剤を付属のシリンジで吸引してください。
2. 必要によりお手持ちの一般針等を接続して薬液を吸引してください。

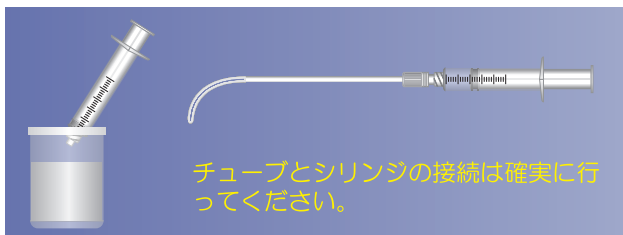

<80ホールタイプの場合>

1. あらかじめ決定した局所麻酔剤をチューブを接続したまま吸引してください。
2. この時ゆっくり吸引してください。また、チューブのホール部すべてを薬液の中に入れてください。

尚、スプレーチューブとシリンジは接着されていますので、取り外すことはできません。

