

## シリコンディスク

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、フレキシブルリングにシリコンゴム膜を接着した構造となっている。フレキシブルリングを変形させることにより、小さな切開創からの挿入が可能になる。フレキシブルリングの復元力により、シリコンゴム膜が拡張する。広い面形状で圧排を行なうことができるため、脆弱な臓器に対しても圧排操作による臓器の損傷が低減できる。

#### <構造図(代表図)>

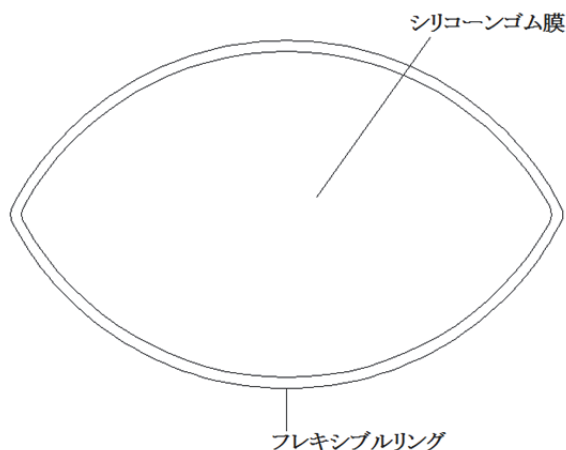

シリコンゴム膜及びフレキシブルリング：シリコンゴム

#### 【使用目的又は効果】

本品は、腹部内臓を原位置に保持または固定するために使用する。

#### 【使用方法等】

- 1) 本品を手でつかみ細長い形状に変形させて、小切開創より腹腔(または胸腔)内に挿入する。
- 2) 把持鉗子で本品の外周部(フレキシブルリング)を把持し、目的の位置まで移動させる。
- 3) ツッペル鉗子等で本品の中央部を押さえて、目的臓器の圧排を行なう。
- 4) 取り出し時には、小切開創より把持鉗子を挿入して、本品の長径端部のフレキシブルリングを把持する。小切開創を通過させる際には、回転させながら細長い形状に変形させて取り出す。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) 本品の主要部分はシリコンゴム製の薄膜であるため、鋭利な器具類との接触は避けること。  
[破損する危険性がある。]
- 3) 本品を把持鉗子で把持する際には、注意して操作すること。  
[把持力が強い場合には、変形および破損を起こす恐れがある。]
- 4) 圧排時には、圧排臓器に対して細心の注意を払うこと。  
[過度な圧排及び長時間の圧排により、臓器損傷の恐れがある。]

#### 【使用上の注意】

##### <不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合
  - ① 本品変形・破損
- 2) 重大な有害事象
  - ① 感染
- 3) その他の有害事象
  - ① アレルギー反応
  - ② 組織損傷
  - ③ 臓器損傷

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### <保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

##### <有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### <製造販売業者>

株式会社八光  
TEL 026-275-0121

##### <製造業者>

株式会社八光

##### 販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目 42-6  
TEL 03-5804-8500