


# みちのくニードルTH

新発売

医療機器認証番号：230ADBZX00052000  
管理医療機器 薬液注入用針

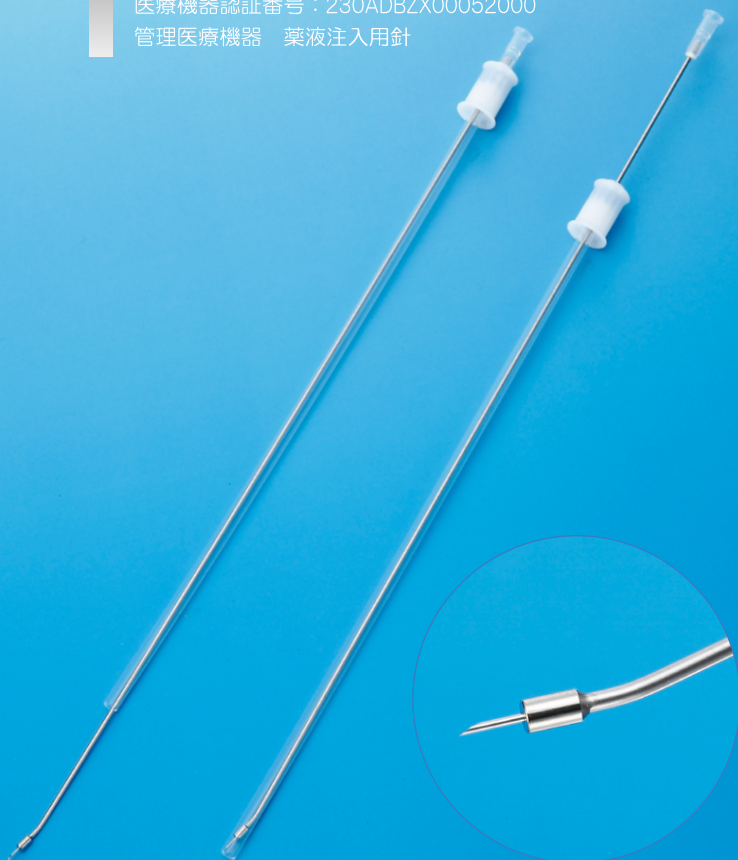

## 用途

腹腔鏡下手術の際、薬液等の注入に使用

## 特長


- 針管先端部の15°アングル加工により容易に針先を確認することができ、安全に薬液等を目的部位へ注入することができます。
- 針先から6mmの位置にストッパーがありますので、深刺しを防ぎます。
- 注入針とリデューサーとで構成されておりますので、トロッカールートへの挿入が容易です。

使用症例（一例）

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術



膨潤TAPP：鼠径部腹膜前腔へ膨潤麻酔剤希釈液を注入することを先行する方法

（手術 第69巻 第11号（2015年10月号）参照）

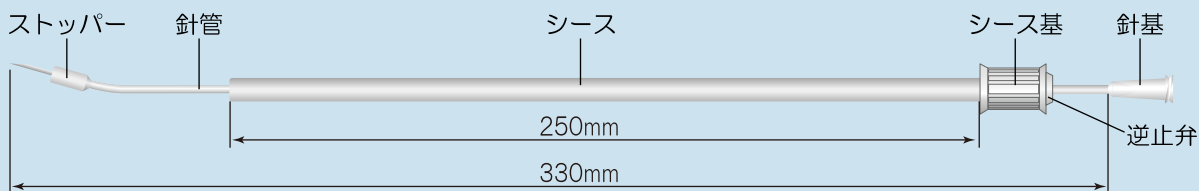

※注入針の先端にはプロテクターが装着された状態で包装されています。取り外してからご使用ください。

拡大図（注入針先端）

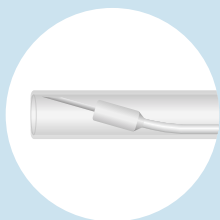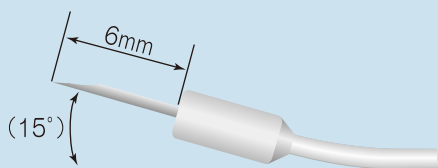

トロッカールートへ挿入する際や、腹腔より抜去する際には、注入針の針基を手前に引いて、針先をシース内に収納してください。

## 仕様

製品コード	サイズ	包装形態
29112300	16G-22G×330mm	1箱5本入、1本毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

本製品をご使用になる際には必ず製品に添付されている医療機器添付文書をお読みください。医療機器添付文書には、製品の使用方法および【禁忌・禁止】事項などの重要な情報が記載されております。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500  
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)611-8520 横浜 ☎(045)954-2111 名古屋 ☎(052)914-8500 福岡 ☎(092)411-4100  
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806  
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター  
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地