


硬膜外麻酔セット

HAKKO DISPOSABLE EPIDURAL ANESTHESIA SET 医療機器承認番号：20100BZZ00789000

ISO80369-6


(誤接続防止の新規格コネクタ)

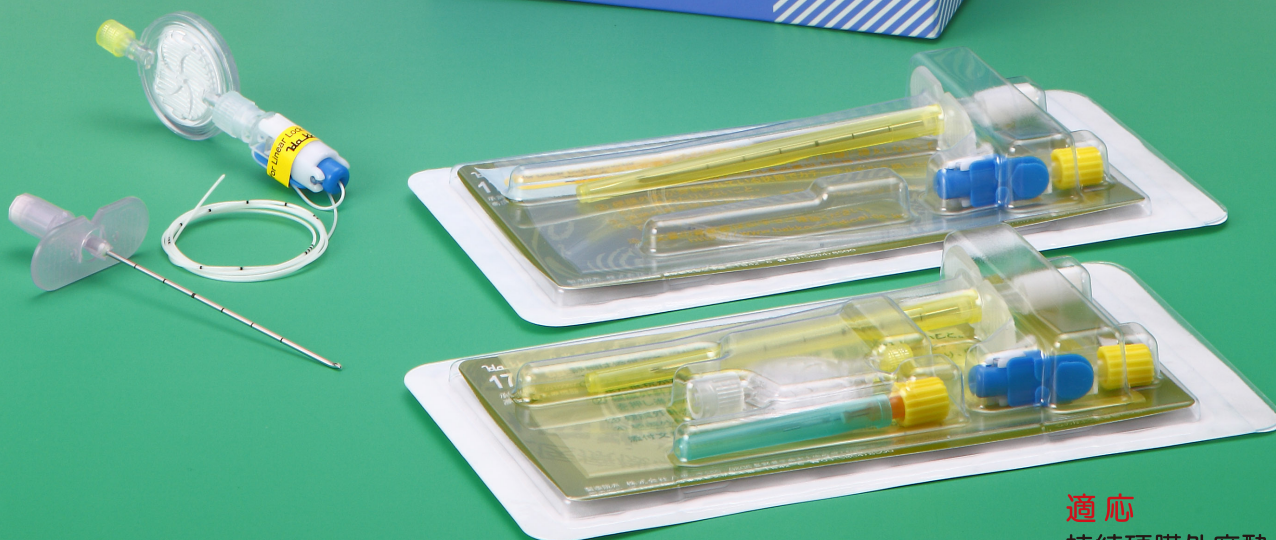

適応
持続硬膜外麻酔
ペインクリニック

特長

- カテーテル接続アダプターに改良を加え、カテーテルを確実に接続・固定し、漏れ・逸脱を防止します。
- 八光持続硬膜外麻酔カテーテルと八光ディスポーザブル硬膜外針のセットです。
- 硬膜外麻酔に不可欠な器具がセットに含まれておりますので、術前準備を簡素化できます。セットはフィルタ付／フィルタなしタイプをご用意しております。

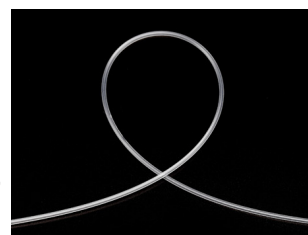

hakko®

脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット 高度管理医療機器



心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

●カテーテルコネクタ操作方法


○カテーテルを接続する場合（固定）

1. プランジャー先端より、硬膜外麻酔用カテーテルを挿入する。
カテーテル端部が最深部まで到達していることを確認してください。（図①②）

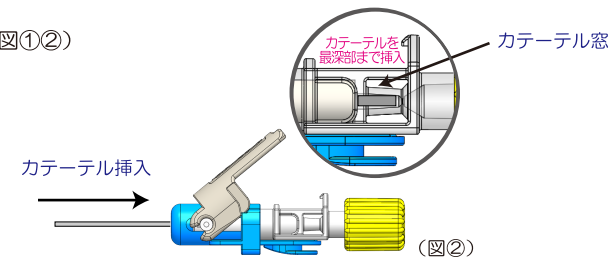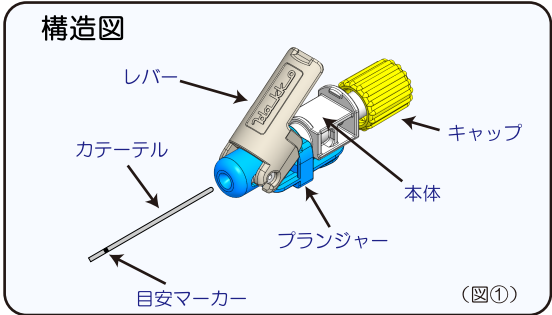


- ①窓の確認
カテーテルが後端まで到達しているか確認
②目安マーカールの確認
カテーテルが後端まで到達していると目安マーカールは隠れます。


2. レバーを押し込み、本体に固定します。（図③④⑤）
（レバーの固定（締付け）は、2段階構造）

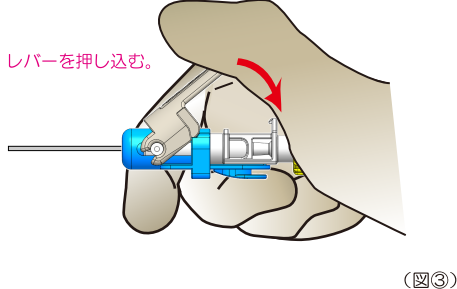

- 1 段階ロック：ハーフロック
テストドーズなどを目的に、カテーテルを一時的に接続する場合、レバーを途中まで押し込んだ状態にします。


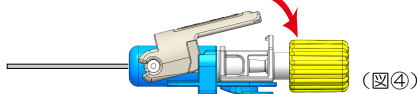


- 2 段階ロック：完全ロック
「カチッ」と音が鳴るまでレバーを押し込みます。確実にロックがされているかを確認してください。

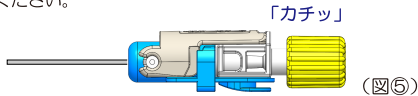




○カテーテルの接続を解除する場合

1. 本品全体を湾曲させ、レバー側凹部とロック用ツメの固定解除を行います。（図⑥⑦）

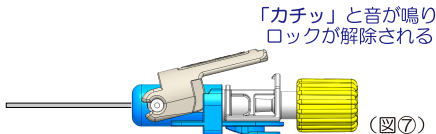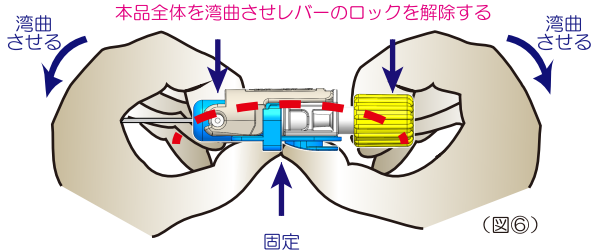

「カチッ」と音が鳴りロックが解除され、レバーが起き上がります。

2. レバーを開放させ、プランジャーを前方へ少し引き出しカテーテルを取り出します。（図⑧⑨⑩）

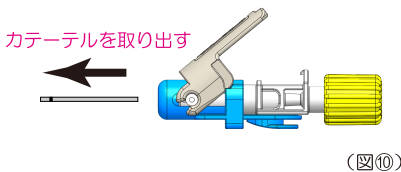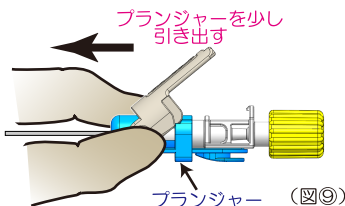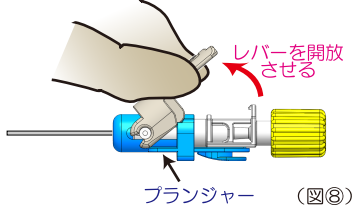

仕 様

「＊」は準規格品です。

製品コード	型式	硬膜外針	硬膜外カテーテル	種類	フィルター	×線不透過	包装形態
27413016	EF17I-95	17G×80mm	1.0×950mm		○		1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 10セット入り
27413056	EF18I-95	18G×80mm	0.8×950mm		○		
27413516	E17I-95	17G×80mm	1.0×950mm				
27413556	E18I-95	18G×80mm	0.8×950mm				
27413566	E19I-OE70	19G×50mm	0.6×700mm				
27414016	EF17H-95	17G×80mm	1.0×950mm	ハード	○		1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 1箱 10セット入り
27414036	EF18H-95	18G×80mm	0.8×950mm	ハード	○		
27414026	E17H-95	17G×80mm	1.0×950mm	ハード			
27414046	E18H-95	18G×80mm	0.8×950mm	ハード			
27414056	EF17HR-95	17G×80mm	1.0×950mm	ハード	○	○	
27414076	EF18HR-95	18G×80mm	0.8×950mm	ハード	○	○	
27414066	E17HR-95	17G×80mm	1.0×950mm	ハード		○	
27414086＊	E18HR-95	18G×80mm	0.8×950mm	ハード		○	

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません。

- ・硬膜外カテーテルにはスタンダードタイプ(表示なし)とハードタイプ(H表示)の2種類があります。
・コネクタ単品販売も行います。【製品コード：27490046 リニアロックコネクタ 1箱20個入り】