

八光アダプター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

- * 本品は、輸液セット等のコネクタ部分と嵌合が可能な形状を有するため、キャップ、接続アダプタ等で使用が可能となる。また ISO594-1/-2(ルアーコネクタ規格)と、ISO80369-6(神経麻酔用コネクタ規格)がある。

<構造図(代表図)>

〔ライン接続用〕

オスオスアダプター



オスメスアダプター



メスメスアダプター



〔止め栓〕

オスアダプター



メスアダプター



本体：ポリプロピレン又はポリアセタール

【使用目的又は効果】

輸液セットなどに用いるアクセサリセットをいう。キャップ類、コネクタ類、アダプタ類等から成る。

【使用方法等】

輸液セット等に接続する。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- * 2) 本品のオスメス嵌合部が ISO80369-6 対応の場合、ISO80369-6 に適合する製品と接続すること。
- * 3) ISO80369-6 であるかどうかは、包装表示で確認すること。
- 4) テーパー部に薬液を付着させないこと。
[嵌合部に緩み等が生じる可能性がある。]
- 5) 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。なお、締め過ぎに注意すること。
[必要以上の過大な力で締め付けると、ひび割れが生じて、薬液が漏れる可能性がある。]
- 6) 本品は、異物混入を防止するものであり、無菌性を保持する目的では使用しないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

低温下では、衝撃等で破損する可能性があるため、取り扱いに注意すること。
[低温下では耐衝撃強度が低下し、破損する恐れがあるため。]

<不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

- 1) その他の不具合
 - ① 本品の変形・破損
 - ② 液漏れ
- 2) 重大な有害事象
 - ① 感染
- 3) その他の有害事象
 - ① アレルギー反応

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

<有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社八光
TEL 026-275-0121

<製造業者>

株式会社八光

販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目 42-6
TEL 03-5804-8500