

Rectal Sonde

レクタルゾンデ

届出番号: 12B2X00014000038 一般医療機器 手術用消息子



適応

直腸の操作・圧排


特長

- 腹腔鏡下手術において、愛護的に直腸の操作・圧排が可能です。

本製品は未滅菌品です。

使用前に必ず所定の方法で滅菌してから使用してください。

構造図

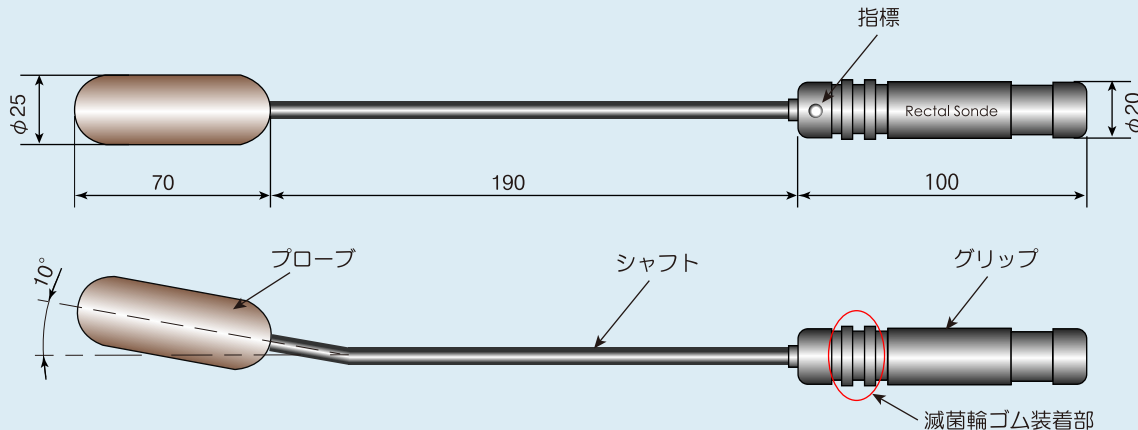

材質

プローブ: PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
シャフト: SUS304 グリッパ: SUS304

ご使用に際して

- ・ ロゴマーク (Rectal Sonde) 及び指標が付いている部分が先端湾曲部分となります。
- ・ 清潔化を保ち操作する場合
プローブカバーをお使い頂き、グリッパ先端くぼみ部分 (赤○部分) へ滅菌輪ゴムで縛ってご使用ください。(プローブカバー及び滅菌輪ゴムは付属していません)

仕様

製品コード	製品名	重さ	包装形態
39030010	レクタルゾンデ	165g	1箱1本入、未滅菌

● 洗浄・滅菌方法

- 1) 洗浄溶液に浸漬する。
(浸漬時間や濃度については、洗浄剤の製造元の指示に従ってください)
- 2) 医療用中性洗剤を用いて柔らかいスポンジでよく洗い、血液や微細組織片など付着した部分を取り除きます。
- 3) 洗剤の残留が無いよう脱イオン水で十分にすすぎ、すぐに乾燥させます。
- 4) 高圧蒸気滅菌またはエチレンオキシドガス (EOG) 滅菌する。
(時間、温度及び圧力の設定は滅菌器製造販売元の取扱説明書を必ず参照)
オートクレーブ滅菌 プレバキューム式 134℃ 5分 推奨

