

スリム・バッグⅡ

SLIM BAG 製造販売届出番号：20B1X00005000009



適応例

内視鏡下胆嚢摘出術、
内視鏡下卵巣嚢腫摘出術 等

適 応

- 内視鏡外科手術における摘出臓器回収

特 長

- 回収バッグは、外径約5mmのシースに収納されていますので5mmのトロッカーから挿入が可能です。
- スリム・バッグに比べ、スリム・バッグⅡはフィルム厚増加により、バッグの強度がUPしています。
- 必要により繰り返し間口開閉を行うことができます。
- 回収バッグはシースから完全に取り出し、体内のどの部分でも留置できますので、トロッカーを専有しません。
- シャフトは全て樹脂でできております。


一般医療機器 組織収納サック

使用上の注意

- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品に添付されています医療機器添付文書をお読みください。
- ・挿入前に必ず保護カバーを取り外してください。
- ・バッグ全体を体外へ取り出す際には、ループだけを把持して取り出さないこと。
- ・バッグの容量を超える切除臓器などの回収は行わないでください。


使用方法及び特長

各部の名称

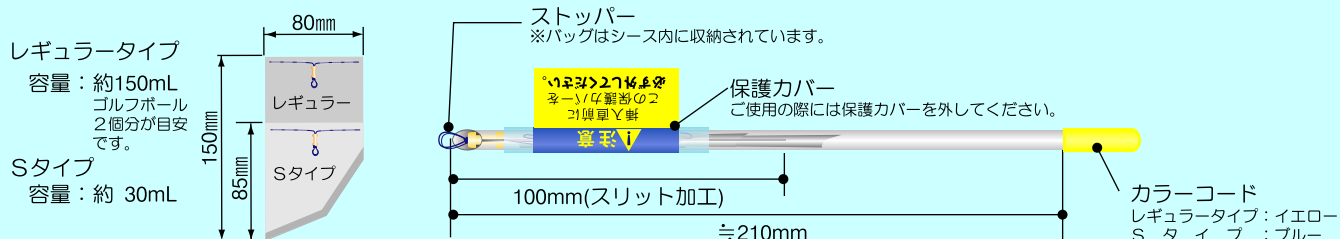

○使用方法

- 1) 単位包装（一次包装）より本製品を取り出します。
- 2) ご使用前に必ず【保護カバー】を取り外します。
- 3) 座屈によるスリット加工部分の開口を防ぐため、シース先端部分を把持し、トロカールへ徐々に挿入します。

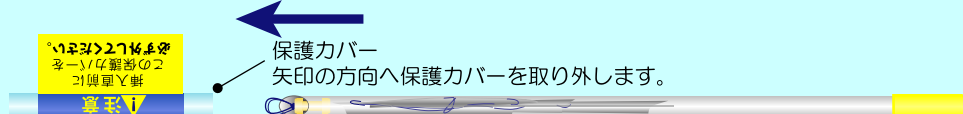

仕 様

製品コード	タイプ	バッグ容量	適用トロッカー	タイプ	シース長
29111100	レギュラータイプ	約150mL	5mm	イエロー	約210mm（全長240mm）
29111110	Sタイプ	約 30mL	5mm	ブルー	

包装形態

1箱5本入り 1セット毎ピールオープン包装、エチレンオキサイトガス滅菌済