

機械器具 51 医療用尿管及び体液誘導管  
一般医療機器 排気用チューブ 70354000

## E・Zairリザーバー

### 再使用禁止


#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

本品はトロカールスリーブのガスポートと排煙装置の間に接続するエアリーザーパーである。ガスポートを通じて排煙された気腹ガスを本体のリザーバーバッグ内部に一時的に保持(貯蔵)し、腔内の急激な内圧変化を軽減する。

#### <構造図(代表図)>

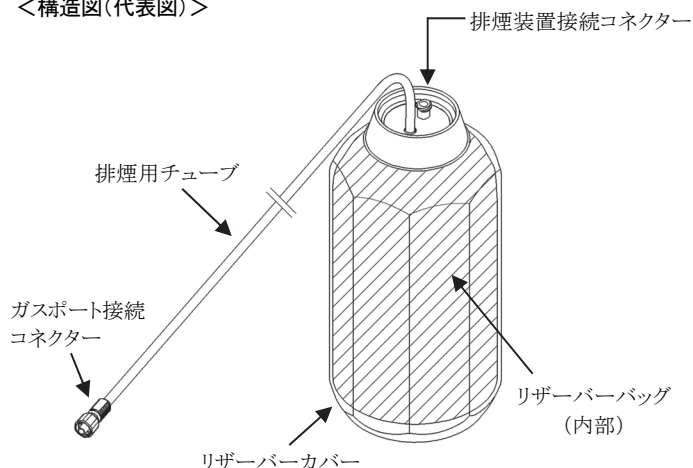

- 1) ガスポート接続コネクタ及び排煙用チューブ:ポリ塩化ビニル(可塑剤:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル))
- 2) 排煙装置接続コネクタ:ポリカーボネート

#### 【使用目的又は効果】

本品は、狭い腔内における内視鏡手術において、腔内の内圧変化を軽減するリザーバーバッグにより術野を安定させることを目的とする。

#### 【使用方法等】

- 1) 排煙装置側のチューブコネクタを排煙装置接続コネクタに接続する。(腔内の大きさにあわせ、必要に応じて本品を2個連結する)
- 2) ガスポート接続コネクタをトロカールスリーブのガスポートに接続する。
- 3) 本品を水平な台に設置する。(横向き)
- 4) 排煙操作を行う。

#### <使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用の際は、汚染に十分注意すること。
- 2) 接続は確実にを行い、使用中は緩みや破損がないことを定期的を確認すること。  
[排煙不良が生じる恐れがある。]
- 3) 気腹開始後、リザーバーバッグが膨らんでいることを確認すること。  
[排煙不良が生じる恐れがある。]
- 4) コネクタ部に薬液を付着させないこと。  
[嵌合部にクラックが生じ、漏れが発生する恐れがある。]
- 5) チューブを牽引した状態で使用しないこと。  
[チューブの破損、または接続部の外れが生じる恐れがある。]
- 6) リザーバーカバーを押さないこと。  
[腔内の内圧が上昇する恐れがある。]
- 7) 本品を水平な位置に置くこと。  
[製品が落下する恐れがある。]

#### 【使用上の注意】

##### <不具合・有害事象>

手技に伴い、一般的な不具合や有害事象が発生する恐れがある。有害事象が発生した場合は術者の知見に基づき、適切な処置を行うこと。

##### 1) その他の不具合

- ① 本品破損
- ② 漏れ

##### 2) 重大な有害事象

- ① 感染

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### <保管方法>

水ぬれ、直射日光、高温多湿を避け保管すること。

##### <有効期間>

箱に記載している使用期限を参照のこと。(自己認証による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### <製造販売業者>

株式会社八光  
TEL 026-275-0121

##### <製造業者>

株式会社八光

##### 販売窓口:

東京都文京区本郷三丁目 42-6

TEL 03-5804-8500