

ベセルフューザー

VESSEL FUSER

医療機器承認番号：21400BZZ00218000

ISO80369-6

(誤接続防止の新規格コネクタ)



適応

局所麻酔薬等を硬膜外腔等へ持続的あるいは間欠的に投与等を行う場合に使用する。

特長

- 100mLタイプ、300mLタイプ、500mLタイプ（シングル/ダブル）の計4タイプをご用意しています。500mLの大容量タイプは術中から術後までの継続使用に最適です。
- フローコントローラー（流量切替機）により流量を12段階に切り替えることが可能です。
- 薬液残量目盛りにて薬液残量を目視で確認できます。
- 独自の流量制御チューブにより、投与開始から終了まで安定した流量が保てます。
- 一度充填された薬液は製品から取り出せない構造となっており、第三者による薬液の不正使用を防止します。

blakk®

加圧式医薬品注入器 高度管理医療機器

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

ベセルフューザー VESSEL FUSER

本製品はISO80369-6対応製品ですので、従来のシリンジを接続することは出来ません

<100mL/300mLタイプ>

●100mL FC


仕様		
製品コード (JANコード)	流量 (mL/hr) ※流量精度±10% (常温30℃)	容量
37100226 (4548263191067)	OFF 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 7.5	100mL

包装形態：1箱10個入、1個毎ピロー包装 EOG滅菌済(ポーチ付)

●300mL FC

仕様		
製品コード (JANコード)	流量 (mL/hr) ※流量精度±10% (常温30℃)	容量
37100236 (4548263191050)	OFF 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 7.5	300mL

包装形態：1箱5個入、1個毎ピロー包装 EOG滅菌済(ポーチ付)

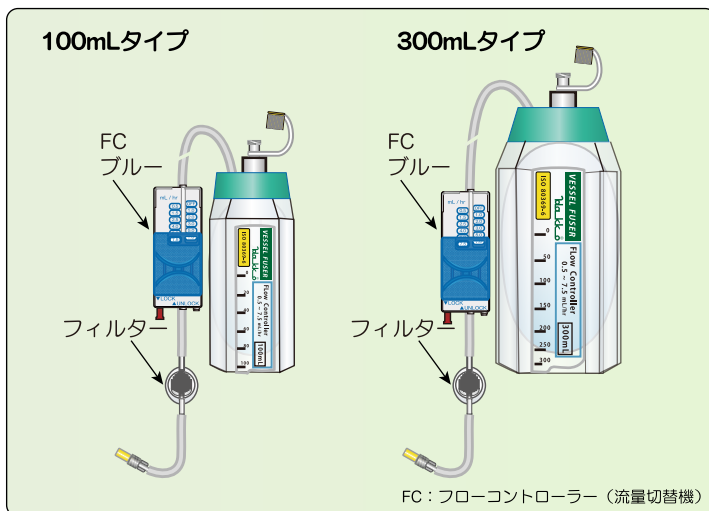

<大容量 500mLタイプ>

●500mL シングル FC


仕様		
製品コード (JANコード)	流量 (mL/hr) ※流量精度±10% (常温30℃)	容量
37100216 (4548263191036)	OFF 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 15	500mL

包装形態：1箱5個入、1個毎ピロー包装 EOG滅菌済(ポーチ付)

●500mL ダブル FC

仕様		
製品コード (JANコード)	流量 (mL/hr) ※流量精度±10% (常温30℃)	容量
37100026 (4548263191043)	OFF 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 7.5 OFF 0.5 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 7 7.5	500mL

包装形態：1箱5個入、1個毎ピロー包装 EOG滅菌済(ポーチ付)

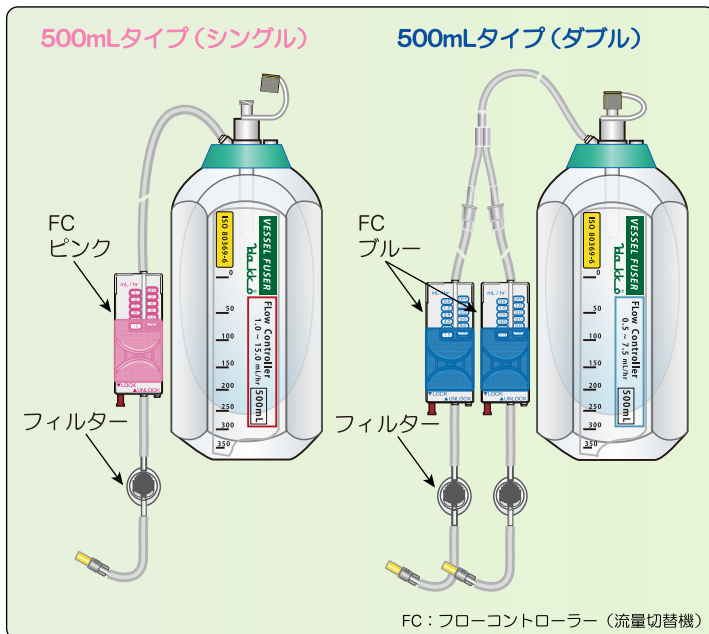


<特定保険医療材料> ※300mL、500mLタイプのみ (2024年6月1日現在)


機能区分 019 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ (2) 標準型 償還価格:3,080円

流量切替方法

●ロック時

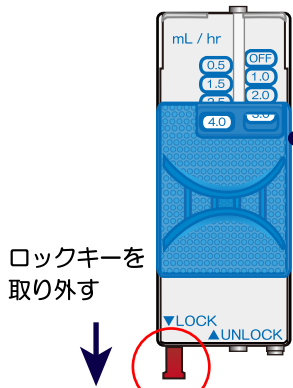

●流量変更

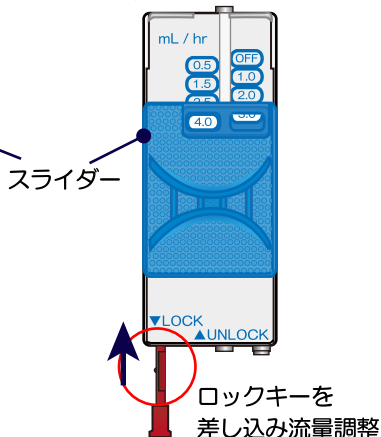

【ロック時】

- 希望する流量の表示にスライダを合わせロックキーを取外し、薬液の投与を開始する。
- ※取り外したロックキーの取り扱いには十分注意してください。

【流量調整】

- 投薬中に流量を調整したい場合は、フローコントローラー下部にロックキーを差し込み、希望する流量表示にスライダを合わせます。
- 流量変更後は、再度ロックキーを取り外してください。

【注意】

- 流量の切り替え及びロックキーの管理は、必ず医療従事者が行ってください。