

キャットハンド

10/12mm用



用途

内視鏡下手術時の臓器圧排・癒着剥離


特長

- 先端バルーンによるソフトな圧排・剥離操作が可能です。
- バルーン外周の不織布材が、滑り止めの効果を発揮します。
- 扁平状のバルーンで操作性が向上しています。
- 10/12mmトロカールより挿入が可能です。

製造販売届出番号：20B1X00005000029
起子 一般医療機器

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

リトラクター本体

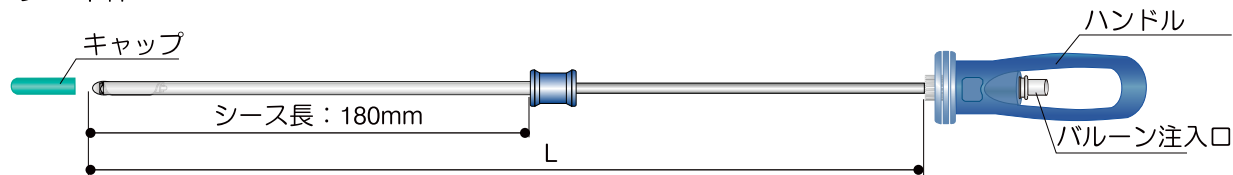

付属品
通気アダプター 1個

バルーン拡張時



※本製品には、シリンジは付属しておりません。

・20mL以上のシリンジ（横口タイプ）をご使用ください。
（中口タイプは、ハンドル基と干渉し接続ができません。）

注1) バルーンを膨らます際には空気を使用して下さい。
注2) バルーン拡張・収納する際には、無理な押し引きしないで下さい。

バルーン押出・収納

押出：時計回りに回転
収納：時計回りに回転

仕様

製品コード	タイプ	有効長(L)	シース長	バルーン注入力	付属品
29111650	10mm レギュラー/ハード	390mm	180mm	20mL~22mL	通気アダプター 1個

包装形態

1箱2セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済