

八光超音波ガイド下

PTC-Dセット T型 1-step

適応

経皮的胆管ドレナージ

(主に肝内胆管径が5mm以上の場合)

特長

- ドレナージカテーテルは、金属スタイレットがセットされているEVタイプです。カテーテルの胆管挿入が容易に行えます。
- ドレナージカテーテルの胆管への挿入が超音波画像上で確認ができます。

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2022年4月現在

告示名：198ドレナージカテーテル

償還価格：5,700円

告示名：033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

機能別分類：(3) 穿刺針

償還価格：1,910円

3

画像診断Ⅱ「ドレナージ」

手技

(基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。)

- 術前準備：
通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(消毒、麻酔含む)
- 胆管の穿刺：
外筒固定針を超音波穿刺用プローブに固定し、穿刺針を固定針に挿入する。
穿刺針の超音波画像の針先エコーを確認しながら、穿刺針を目標とする胆管に穿刺する。
穿刺針の内針を抜去する。この時、胆汁の流出があることが多い。
穿刺針の刃面は肝門方向へ向ける。
- ガイドワイヤー(別売)の挿入と穿刺針の抜去：
ガイドワイヤーの進入方向を超音波画像上で確認しながら挿入する。
十分にガイドワイヤーが挿入されたところで、穿刺針を抜去する。
ガイドワイヤーの位置を確認する。
挿入したガイドワイヤーの屈曲が強い場合、ダイレーター(別売)を用いてやや直線に近い形に補正しておく、次のEVドレナージカテーテルの挿入が容易になる。
- カテーテルの挿入留置：
カテーテルの挿入はX線透視下で行う。
カテーテルをガイドワイヤーに沿ってゆっくり挿入する。
内針が僅かに胆管に挿入されたところで、内針を固定して外管カテーテルだけを送り込む。
この時、内針が胆管内に迷入しないようにしっかり固定する。
内針を抜去する。
- 胆汁の吸引・造影：
胆汁を吸引し、胆道造影でカテーテルの位置等を確認する。
- カテーテルの固定：
カテーテルをカテーテル固定板によって腹壁に固定する。固定板と皮膚の固定は、皮膚が壊死を起こさないよう縫合糸で緩く行う。
固定板とカテーテルは強く固定する。
必要に応じて固定用粘着テープで固定する。
- ドレナージ：
カテーテルを延長チューブ等を介してドレナージバックと接続する。

仕様

管理医療機器 短期的使用胆管用カテーテル

| 製品コード | セット内容 | 包装形態 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 22110350 | 外筒固定針 1step用 14G×85mm (22990020) | 1箱1セット入、 1セット毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済 |
| | 穿刺針 18G×180mm (22410010) | |
| | EVドレナージカテーテル 17G×270mm (22210100) | |
| | カテーテル固定板 ベルト付き | |
| | カテーテル固定板 ベルトなし | |

※本セットは、セットを構成する部品単独での販売も行なっています。上記表の()に記載の8桁の数字が部品単独の製品コードです。最小販売単位は1箱です。(外筒固定針および穿刺針は1箱10本入、EVドレナージカテーテルは1箱2本入)

併用器具(別売)

医療機器認証番号：219ADBZX00189000

医療機器承認番号：16300BZZ00863000

| 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 | 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 |
|-------------|----------|---------------------------|------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 八光ガイドワイヤーNV | 22330200 | AC7イ7 J 0.8(0.032")×800mm | 1箱2本入、 EOG滅菌済 | ダイレーター | 22510020 | 7Fr × 200mm | 1箱5本入、 EOG滅菌済 |
| | | | | | 22510030 | 8Fr × 200mm | |
| | | | | | 22510040 | 9Fr × 200mm | |

告示名：197 ガイドワイヤー 償還価格：1,880円 2022年4月現在

告示名：033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料
機能別分類：(2) ダイレーター ②サイズなし 償還価格：2,140円 2022年4月現在

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL(03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

| | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 札幌 (011)215-1530 | 横浜 (045)954-2111 | 名古屋 (052)732-8503 | 福岡 (092)411-4100 |
| 仙台 (022)257-8502 | 長野 (026)276-3083 | 大阪 (06)6453-9102 | 熊本 (096)288-4690 |
| 柏 (04)7131-8580 | 金沢 (076)225-8560 | 岡山 (086)243-3985 | 本郷商品管理センター (03)5840-8502 |
| 本郷 (03)5804-8500 | 静岡 (054)282-4185 | 松山 (089)935-8517 | |

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2302(A)

八光超音波ガイド下

PTC-Dセット T型 1-step タイプ2

適応

経皮的胆管ドレナージ
(主に肝内胆管径が5mm以上の場合)

特長

- ドレナージカテーテルは、金属スタイレットがセットされているEVタイプです。カテーテルの胆管挿入が容易に行えます。
- ドレナージカテーテルの胆管への挿入が超音波画像上で確認ができます。
- 包装はトレイタイプです。

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2022年4月現在

告示名：198ドレナージカテーテル

償還価格：5,700円

告示名：197ガイドワイヤー

償還価格：1,880円

告示名：033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

機能別分類：(3) 穿刺針

償還価格：1,910円

手技

(基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。)

- 術前準備：
通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(消毒、麻酔含む)
- 胆管の穿刺：
外筒固定針IIを超音波穿刺用プローブに固定し、穿刺針PWを固定針に挿入する。
穿刺針の超音波画像の針先エコーを確認しながら、穿刺針を目標とする胆管に穿刺する。
穿刺針の内針を抜去する。この時、胆汁の流出があることが多い。
穿刺針の刃面は肝門方向へ向ける。
- ガイドワイヤーの挿入と穿刺針の抜去：
J型ガイドワイヤーの進入方向を超音波画像上で確認しながら挿入する。
十分にガイドワイヤーが挿入されたところで、穿刺針を抜去する。
ガイドワイヤーの位置を確認する。
挿入したガイドワイヤーの屈曲が強い場合、ダイレーター(別売)を用いてやや直線に近い形に補正しておくこと、次のEVドレナージカテーテルの挿入が容易になる。
包装内から取り出し、輸液セット等に接続する。
- カテーテルの挿入留置：
カテーテルの挿入はX線透視下で行う。
カテーテルをガイドワイヤーに沿ってゆっくり挿入する。
内針が僅かに胆管に挿入されたところで、内針を固定して外筒カテーテルだけを送り込む。
この時、内針が胆管内に迷入しないようにしっかり固定する。
内針を抜去する。
- 胆汁の吸引・造影：
胆汁を吸引し、胆道造影でカテーテルの位置等を確認する。
- カテーテルの固定：
カテーテルをカテーテル固定板によって腹壁に固定する。固定板と皮膚の固定は、皮膚が壊死を起こさないよう縫合糸で緩く行う。
固定板とカテーテルは強く固定する。
必要に応じて固定用粘着テープで固定する。
- ドレナージ：
カテーテルを延長チューブ等を介してドレナージバックと接続する。

仕様

管理医療機器 短期的使用胆管用カテーテル

| 製品コード | セット内容 | 包装形態 |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| 22111220 | 外筒固定針II 15G×45mm 1ステップ用 | 1箱1セット入、 トレイ包装、 EOG滅菌済 |
| | 穿刺針PW 18G×180mm 1ステップ用 | |
| | EVドレナージカテーテル 17G×270mm | |
| | J型ガイドワイヤー 0.9mm(0.035")×800mm | |
| | カテーテル固定板 ベルトなし | |

併用器具(別売)

医療機器認証番号：219ADBZX00189000

医療機器承認番号：16300BZZ00863000

| 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 | 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 |
|--------------|----------|---------------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------------|
| 八光ガイドワイヤー-NV | 22330200 | AC717 J 0.8(0.032")×800mm | 1箱2本入、 EOG滅菌済 | ダイレーター | 22510020 | 7Fr × 200mm | 1箱5本入、 EOG滅菌済 |
| | 22330210 | AC717 J 0.9(0.035")×800mm | | | 22510030 | 8Fr × 200mm | |
| | | | 22510040 | | 9Fr × 200mm | | |

告示名：197 ガイドワイヤー

償還価格：1,880円

2022年4月現在

告示名：033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

機能別分類：(2) ダイレーター ②シースなし 償還価格：2,140円

2022年4月現在

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。

八光超音波ガイド下

PTC-Dセット T型 2-step

適応


経皮的胆管ドレナージ
(肝内胆管径が5mm未満の場合、
門脈との鑑別が困難な場合)

特長

- ドレナージカテーテルは、金属スタイレットがセットされているEVタイプです。カテーテルの胆管挿入が容易に行えます。
- ドレナージカテーテルの胆管への挿入が超音波画像上で確認ができます。
- 22Gの穿刺針で穿刺。主に肝内胆管の拡張が少ない場合に適しています。

◆本製品は特定保険医療材料です◆ 2022年4月現在

| | |
|------------------------------|-------------|
| 告示名：198ドレナージカテーテル | 償還価格：5,700円 |
| 告示名：198ドレナージカテーテル | 償還価格：5,700円 |
| 告示名：197ガイドワイヤー | 償還価格：1,880円 |
| 告示名：033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 | |
| 機能別分類：(3) 穿刺針 | 償還価格：1,910円 |

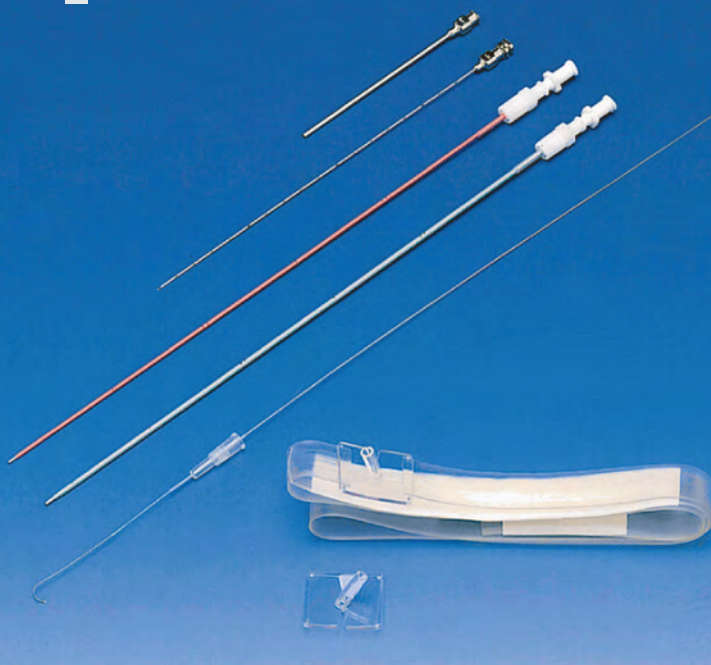

手技 (基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。)

- 術前準備：通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(消毒、麻酔含む)
- 胆管の穿刺：外筒固定針を超音波穿刺用プローブに固定し、穿刺針を固定針に挿入する。穿刺針の超音波画像の針先エコーを確認しながら、穿刺針を目標とする胆管に穿刺する。穿刺針の内針を抜去する。この時、胆汁の自然流出がないことが多く、シリンジで軽く吸引し胆汁を確認する。
- 誘導ワイヤーの挿入と穿刺針の抜去：誘導ワイヤーの進入方向を超音波画像上で確認しながら挿入する。十分に挿入されたところで、穿刺針を抜去する。誘導ワイヤーの位置を確認する。
- EVドレナージカテーテル19Gの挿入留置：カテーテルの挿入はX線透視下で行う。カテーテルを誘導ワイヤーに沿ってゆっくり挿入する。カテーテルの内針が僅かに胆管に挿入されたところで、内針を固定して外管カテーテルだけを送り込む。この時、内針が胆管内に迷入しないようにしっかり固定する。内針を抜去する。
- 胆汁の吸引・造影：胆汁を吸引し、胆道造影でカテーテルの位置等を確認する。
- EVドレナージカテーテル17Gの挿入留置：カテーテル19Gにガイドワイヤー(別売)を挿入する。十分にガイドワイヤーが挿入されたところで、カテーテルを抜去する。ガイドワイヤーの位置を確認する。カテーテル17Gをガイドワイヤーに沿って、ゆっくり挿入する。この時、内針が胆管内に迷入しないように、しっかり固定する。内針を抜去する。
- カテーテルの固定：カテーテルをカテーテル固定板によって腹壁に固定する。固定板と皮膚の固定は、皮膚が壊死を起こさないよう縫合糸で緩く行う。固定板とカテーテルは強く固定する。必要に応じて、固定用粘着テープで固定する。
- ドレナージ：カテーテルを延長チューブ等を介してドレナージバックと接続する。

仕様

管理医療機器 短期的使用胆管用カテーテル

| 製品コード | セット内容 | 包装形態 |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 22110330 | 外筒固定針 2step用 14G×85mm (22990030) | 1箱1セット入、 1セット毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済 |
| | 穿刺針 22G×180mm (22410020) | |
| | EVドレナージカテーテル 19G×270mm (22210110) | |
| | EVドレナージカテーテル 17G×270mm (22210100) | |
| | 誘導ワイヤー 0.45×650mm (22330410) | |
| | カテーテル固定板 ベルト付き | |
| | カテーテル固定板 ベルトなし | |

※本セットは、セットを構成する部品単独での販売も行なっています。上記表の()に記載の8桁の数字が部品単独の製品コードです。最小販売単位は1箱です。(外筒固定針および穿刺針は1箱10本入、EVドレナージカテーテルおよび誘導ワイヤーは1箱2本入)

併用器具(別売)

医療機器認証番号：219ADBZX00189000

医療機器承認番号：16300BZZ00863000

| 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 | 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 |
|-------------|----------|--------------------------|------------------|--------|----------|-------------|------------------|
| 八光ガイドワイヤーNV | 22330200 | ACタイプ J 0.8(0.032)×800mm | 1箱2本入、 EOG滅菌済 | ダイレーター | 22510020 | 7Fr × 200mm | 1箱5本入、 EOG滅菌済 |
| | 22330210 | ACタイプ J 0.9(0.035)×800mm | | | 22510030 | 8Fr × 200mm | |
| | | | | | 22510040 | 9Fr × 200mm | |

告示名：197 ガイドワイヤー 償還価格：1,880円 2022年4月現在

告示名：033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 機能別分類：(2) ダイレーター ②サイズなし 償還価格：2,140円 2022年4月現在

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。

ドレナージカテーテル

フラワーカテーテルY型セット

HAKKO FLOWER-CATHETER TYPE-Y

医療機器承認番号：16200BZZ00678000



3

画像診断Ⅱ「ドレナージ」


適 応

経皮的胆管ドレナージ

特 長

- カテーテル基部のスライド操作で、カテーテル先端部がフレア状に開き、その状態を保持することができます。
- カテーテル先端部がフレア状に開くことにより、胆管外逸脱を防止します。
- フレア状に開いても、胆管内を完全に閉塞させることはありません。
- 一般のカテーテルと比較して、留置中の管理が容易です。

カテーテル先端部

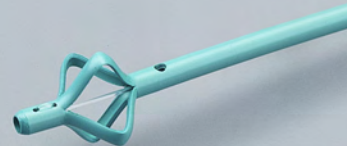

hakko[®]

管理医療機器 短期的使用胆管用カテーテル

心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

ドレナージカテーテル フラワーカテーテルY型セット

手技 (基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報 (電子添文等) の内容を必ずご確認ください。)

1) 術前準備

- 通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(麻酔、消毒等)
- フラワーカテーテルY型 (以下、カテーテル) のカテーテル基のスライド部 (ストッパー) を1目盛りだけ引いて、カテーテルのフレア部の開き具合を確認する。
※カテーテルが曲がっている場合とストレートの場合では、フレアの状態が多少異なる。
- フレアの開きが不十分と考えられる場合には、第2段目を使用する。
- ストッパーを解除し、スライド部を押し戻しておく。

2) カテーテルの留置

- 超音波誘導下において目的とする胆管を18GのPTC針で穿刺する。(図-1)
PTC針の内針を抜去し、胆汁の流出を確認後、希釈した造影剤にて胆道を造影する。
- 18G PTC針の外針内にφ0.9mm (0.035") のJ型ガイドワイヤーを挿入し、目的とする胆管内に十分進めしておく。(図-2)
この後、外針に沿ってメスで皮下を十分切開開大し、次に行うシース付ダイレクターの挿入を容易にする。
- PTC針を抜去後、ガイドワイヤーに沿ってシース付ダイレクターを胆管内まで挿入する。(図-3)
X線透視下にダイレクターが胆管に十分挿入されていることを確認した後、ダイレクターに付したマークを目安にシースを胆管内に進める。
- ガイドワイヤーとシースが抜けかないように十分に固定しながら、ダイレクターのみを抜去した後、カテーテルをガイドワイヤーに沿って胆管内に挿入する。(図-4)
- カテーテル基のスライド部をストッパー機能が働く位置までゆっくり引く。カテーテルのフレア部が変形するので、開きをX線透視下で確認する。胆管内よりシースを抜去し、カテーテルのみを胆管穿刺部まで引き抜き、カテーテルが胆管外に逸脱しないことを確認する。その後カテーテルを再び、胆管内の目的とする位置まで進める。
- ガイドワイヤーを抜去し、続いてシースを体外へ抜去する。このとき、胆道内出血または、皮膚穿刺部の創より出血が続くようであれば、圧迫止血の目的で再びシースを胆内まで進めて留置し、数日後に抜去する。フレア変形部と胆道穿刺部との距離にゆとりを持たせるために、患者に最大呼吸、呼吸を行わせ、カテーテルの位置を調節した後、体壁に固定する。(図-5)

3) カテーテル基のスライド部の固定

- 長期留置に際し、安全性の確保のため、下記のいずれかの方法で固定すること。
- 縫合糸をスライド部の糸穴に通し、スライド部とカテーテル基を縫合固定する。
 - スライド部とカテーテル基を粘着テープで巻き固定する。

4) カテーテルの交換

スライド部の糸穴付近を上方向に上げ、スライド部を押し戻してストッパーを解除し、J型あるいはストレートのガイドワイヤーを挿入する。
※ガイドワイヤーがフレア部でつかえた場合、カテーテルがワイヤーの方向を変えることにより挿入可能となる。その後、ゆっくりカテーテルを抜去する。先端フレアは、ストッパーを解除しても若干開いた状態にあるが、ストッパーを解除することにより管壁に損傷を与えることなく抜去できる。なお、ガイドワイヤーがフレアの間より出る場合があるが、抜去に際しては問題ない。

5) カテーテルの抜去

- と同様にストッパーを解除してから、カテーテルをゆっくり抜く。

図-1

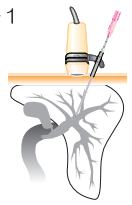


図-2

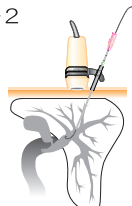


図-3



図-4



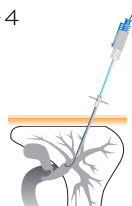


図-5

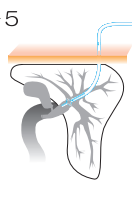


本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報 (電子添文等) の内容を必ずご確認ください。

シース付ダイレクター (ピールアウェイタイプ)

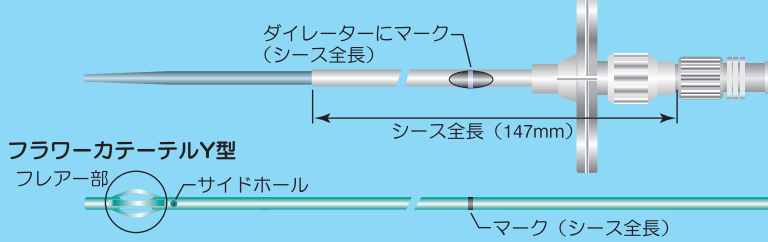

*イラストは若干誇張されています。

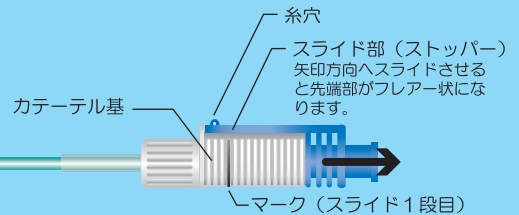

仕 様

| 製品コード / JANコード | セット内容 | 包装形態 |
|--------------------------|--|--------------------------|
| 22110500 / 4526737220987 | ・フラワーカテーテルY型 : 7Fr×300mm (グリーン) ・シース付ダイレクター : 7Fr用 (ピールアウェイタイプ) | 1箱2セット入り |
| 22110510 / 4526737220994 | ・フラワーカテーテルY型 : 8Fr×300mm (イエロー) ・シース付ダイレクター : 8Fr用 (ピールアウェイタイプ) | 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 |

< 特定保険医療材料 > 198 ドレナージカテーテル 償還価格 : 5,700円
033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料
(2) ダイレクター ①シースあり 償還価格 : 2,670円

2022年4月現在

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03) 5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011) 215-1530 横浜 (045) 954-2111 名古屋 (052) 914-8500 福岡 (092) 411-4100
仙台 (022) 257-8502 長野 (026) 276-3083 大阪 (06) 6453-9102 熊本 (096) 288-4690
柏 (04) 7131-8580 金沢 (076) 225-8560 岡山 (086) 243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03) 5804-8500 静岡 (054) 282-4185 松山 (089) 935-8517 (03) 5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

ピッグテールカテーテル^{※1} ドレナージカテーテル^{※2}

短期的使用胆管用カテーテル 管理医療機器
医療機器承認番号：20100BZZ02090000^{※1}
16100BZZ00268000^{※2}



適応

経皮的胆管ドレナージ、胆嚢ドレナージ

特長

＜ピッグテールカテーテル＞

- カテーテルはスタンダードタイプとストリングタイプ
の2種類あります。
- 先端部のピッグテール形状により、カテーテル
の逸脱を防止できます。
- ストリングタイプは、胆管・胆嚢内でピッグテ
ール形状がストリングによって保持されますの
で、患者の過度の動きに対しても逸脱が防止で
きます。
- カテーテルは、適度な柔軟性により胆管および
胆嚢への挿入・留置が容易です。


◆本製品は特定保険医療材料です◆ 2022年4月現在

| | | |
|---------------|--|-------------|
| ＜ピッグテールカテーテル＞ | | |
| 告示名 | 198 ドレナージカテーテル | 償還価格：5,700円 |
| ＜ドレナージカテーテル＞ | | |
| 告示名 | 033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 (1) カテーテル | 償還価格：4,600円 |

本製品をご使用になる際には、製品の注意事項等
情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。

スタンダードタイプ

ストリングタイプ

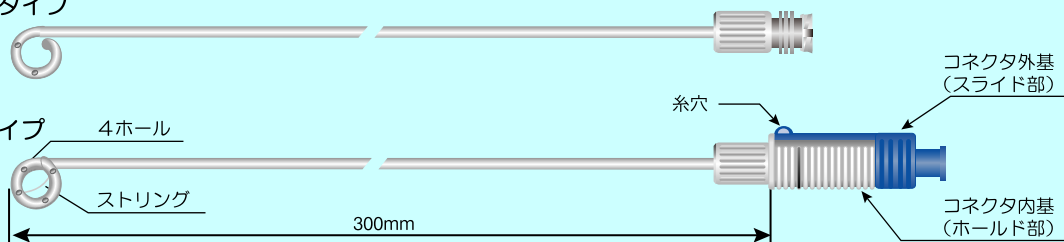

※PTC針B型18G、八光ガイドワイヤーNV0.8mm(0.032")と併せてご使用ください。

仕様

| 製品名 | 製品コード | タイプ | サイズ | 包装形態 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| ピッグテール カテーテル | 22230020 | スタンダードタイプ | 7Fr×300mm | 1箱2本入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 |
| | 22230050 | | 8Fr×300mm | |
| | 22230010 | ストリングタイプ | 7Fr×300mm | |
| | 22230040 | | 8Fr×300mm | |

仕様

「*」は準規格品です。

| 製品名 | 製品コード | タイプ | サイズ | 包装形態 |
|----------------|-----------|----------|-----------|------------------------------|
| ドレナージ カテーテル | 22210210 | ストレートタイプ | 7Fr×300mm | 1箱2本入、1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済 |
| | 22210220* | | 8Fr×300mm | |

関連製品

承認番号：16200BZZ00192000

認証番号：219ADBZX00189000

| 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 | 製品名 | 製品コード | サイズ | 包装形態 |
|---------|----------|-----------|------------------|-------------|----------|---------------------------|------------------|
| PTC針 B型 | 22411810 | 18G×150mm | 1箱5本入り EOG滅菌済 | 八光ガイドワイヤーNV | 22330200 | ACタイプ J 0.8(0.032")×800mm | 1箱2本入り EOG滅菌済 |
| | 22411820 | 18G×180mm | | | 22330210 | ACタイプ J 0.9(0.035")×800mm | |
| | 22411830 | 18G×200mm | | | | | |

告示名：197 ガイドワイヤー 償還価格：1,880円 2022年4月現在

カテーテル拡張器 管理医療機器

ダイレーター

DILATOR FOR PTC-D

医療機器承認番号：16300BZZ00863000

適 応

経皮的胆管ドレナージ等のカテーテル挿入時におけるダイレーション

特 長

- 適度な硬さを有していますので、ドレナージカテーテル等の挿入時におけるダイレーションが容易に行えます。
- 基部はサイズ毎にカラーコード化されています。

◆ 本製品は特定保険医療材料です ◆

2022年4月現在

告示名

033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

(2) ダイレーター

② シースなし

償還価格：2,140円

仕 様

「*」は準規格品です。

| 製品コード / JANコード | サイズ | カラーコード |
|---------------------------|------------|--------|
| 22510020 / 4526737222509 | 7Fr×200mm | オレンジ |
| 22510030 / 4526737222516 | 8Fr×200mm | ブルー |
| 22510040 / 4526737222523 | 9Fr×200mm | 白 |
| 22510050 / 4526737222530 | 10Fr×200mm | 紫色 |
| 22510060* / 4526737222547 | 11Fr×200mm | グレー |
| 22510070 / 4526737222554 | 12Fr×200mm | 濃紺 |

包装形態

1箱5本入 1本毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

・本製品をご使用になる場合には、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

ドレナージカテーテル

超音波ガイド下1ステップドレナージセットS型

医療機器承認番号：16200BZZ00396000

管理医療機器

短期的使用胆管用カテーテル



適応

膿瘍ドレナージ、嚢胞ドレナージ、嚢胞内エタノール注入

特長

- 超音波ガイド下の一回の刺入でドレナージカテーテルの挿入・留置が行えます。
- 内針（金属針）を抜去すると先端がピッグテール状になります。
- 先端ピッグテール形状で、カテーテルの逸脱を防止します。

◆本製品は特定保険医療材料です◆ 2022年4月現在

| | |
|---|-------------|
| 告示名 198ドレナージカテーテル | 償還価格：5,700円 |
| 告示名 033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 (3) 穿刺針 | 償還価格：1,910円 |

・本製品をご使用になる場合には、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

手技（基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。）

- 術前準備
 - ① 通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。
 - ② カテーテルに直断針(内筒)を挿入する。その後、スタイレット針を内筒にセットする。(カテーテルを傷つけないように注意すること。)
 - ③ スタイレット針、内筒がカテーテル先端より出ていることを確認する。
- 局所麻酔および試験穿刺

(目標が嚢胞や胆嚢のように明らかな場合は、試験穿刺は不要。)


 - ① 超音波画像上にて、穿刺目標および穿刺経路を確認する。
 - ② 皮膚・腹膜・肝被膜まで十分に局所麻酔を行い、そのまま目標内腔まで刺入させ、吸引し内容を確認する。
- 穿刺ドレナージ
 - ① 皮膚に小切開を加え、試験穿刺と同じ方法にて目標腔を穿刺する。
 - ② 針先がその内腔に到達したことを映像上にて確認後、スタイレット針を抜去する。必要により逆流の確認をする。その位置で内筒を固定したまま、外側に装着してあるカテーテルを十分に押し込み、内筒を抜去する。
 - ③ 超音波画像上にて、先端がピッグテール状になっていることを確認する。
 - ④ 内容を十分吸引した後、造影を行い内腔の広がりを確認する。
- カテーテルの固定：
 - ① カテーテルと皮膚と縫合固定し、さらに粘着テープで固定する。

仕様

| 製品コード | サイズ | 仕様 | カテーテルカラー |
|----------|----------------------|------------------|----------|
| 22110100 | 7Fr×300mm | 内針：18G サイドホール：4個 | グリーン |
| 22110130 | 8Fr×300mm | 内針：17G サイドホール：5個 | クリームイエロー |
| 22110120 | 7Fr×300mm ロック式 | 内針：18G サイドホール：4個 | グリーン |
| 22110160 | 8Fr×300mm ロック式 | 内針：17G サイドホール：5個 | クリームイエロー |
| 22110230 | 7Fr×300mm ソフトタイプロック式 | 内針：18G サイドホール：4個 | グリーン |

包装形態

1箱2セット入 1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済

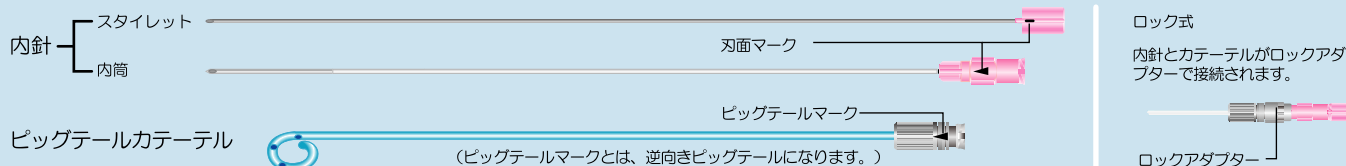

胸腔穿刺針

トラセンタ

THORACENTA

医療機器承認番号：20800BZZ00202000

胸部排液用チューブ

管理医療機器

適 応

胸腔ドレナージ（漿液性貯留液等）
気胸ドレナージ（肺生検等による）

特 長

- 外管ドレナージ用カテーテルは柔軟性があり、屈曲による内径閉塞を生じることがほとんどありません。また、留置中における肺損傷を極力避けることができます。
- カテーテル先端にはサイドホールがあり、ドレナージ効果を高めます。
- 針先形状は、刺入性を確保し刃長を短くすることによって、穿刺時における肺穿刺の危険性を最小限に抑えます。
- 二方活栓あるいは三方活栓があらかじめ接続されていますので、簡単に回路を閉鎖、または切り替えることができます。

手 技（基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。）

1 刺入・カテーテル留置

- ① 胸部X線画像により、刺入点を決定しマーキングを行う。
- ② 皮膚面を広範囲に消毒し、局所麻酔を施した後、刺入点に小切開を加える。
- ③ 穿刺針のプロテクターをはずす。
- ④ 肋間より、皮膚に対して斜めに穿刺し、静かにシリンジで吸引することにより、先端が胸腔内にあることを確認する。低圧持続吸引器を使用する場合、確認後カテーテルのみを目的の深さまで挿入する。
- ⑤ カテーテルを保持しながら内針を静かに抜去する。内針を抜去すると同時に活栓を閉じる。三方活栓はコックのOFF位置が、閉塞した流路となる。
- ⑥ カテーテルの挿入・留置位置を、胸部X線画像（正面・側面）で確認する。

2 吸引・排出

＜市販の延長チューブを用いて手動吸引する場合＞

- ① 延長チューブと別途用意したシリンジを接続する。
- ② 延長チューブと穿刺針活栓部を接続する。
- ③ 活栓を開き、シリンジを引き、内容液を吸引する。
- ④ 活栓を閉じ、シリンジを取り外し排出する。
- ⑤ ②～④の操作を繰り返す。

＜低圧持続吸引器を使用する場合＞

- ① カテーテルを縫合固定し、穿刺針活栓部と低圧持続吸引器を接続する。
- ② 活栓を開き、低圧持続吸引器により、吸引排出する。
- ③ 持続吸引中、必要に応じて、カテーテルの留置位置を胸部X線写真（正面・側面）で確認する。
- ④ 活栓を閉じ、吸引排出を止める。

仕 様

※サイズ表示は外管ドレナージカテーテルのサイズです

| 製品コード | サイズ | 活栓の仕様 | 内針サイズ |
|----------|----------------|-------|---------------|
| 22112010 | 7Fr × 75mm | 二方活栓 | 18G (φ1.26mm) |
| 22112100 | 7Fr × 150mm YS | 三方活栓 | |

包装形態

1箱5セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

本製品をご使用になる場合には、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

| | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 札幌 (011)215-1530 | 横浜 (045)954-2111 | 名古屋 (052)914-8500 | 福岡 (092)411-4100 |
| 仙台 (022)257-8502 | 長野 (026)276-3083 | 大阪 (06)6453-9102 | 熊本 (096)288-4690 |
| 柏 (04)7131-8580 | 金沢 (076)225-8560 | 岡山 (086)243-3985 | 本郷商品管理センター |
| 本郷 (03)5804-8500 | 静岡 (054)282-4185 | 松山 (089)935-8517 | (03)5840-8502 |

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakkō®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

3

画像診断Ⅱ「ドレナージ」

2207(A)