

末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット 高度管理医療機器

新生児用中心静脈注射用カテーテル NCVカテーテルセット

NCV CATHETER SET 医療機器承認番号：20800BZZ00531000


ダブルルーメン

適応

新生児の中心静脈栄養法

特長

- ・カテーテルは、ダブルルーメン。
一回の穿刺で二つのルート確保ができます。
- ・ダブルルーメンとしては、中心静脈栄養カテーテルの中で最も細い29G（相当）のカテーテルです。
- ・一般的なプラスチックカニューレ型静脈留置針24Gをイントロデューサーとして使用できます。
- ・カテーテル基は、留置針の外筒基と嵌合できる形状で、留置後の固定を容易に行うことができます。

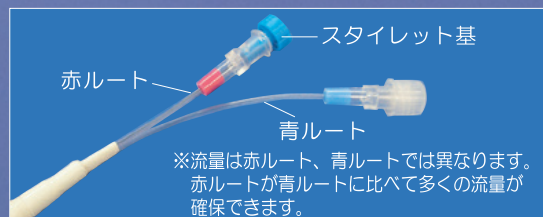

＜ダブルルーメンをご使用になる場合＞

- ・延長チューブ部のエア抜きについて
赤ルート：カテーテル挿入後、スタイレットを抜き延長チューブまで血液が上がって来るのを確認後、シリンジを接続し吸引する。
- 青ルート：挿入前に生理食塩液（ヘパリン加生理食塩液）をカテーテル内に充填する。

※使用しないルート（ルーメン）について

使用しないルートは、ヘパリン加生理食塩液を充填してください。
（スタイレットは挿入したままにしないでください。）

このルートを使用する場合には、ヘパリン加生理食塩液でフラッシュし、詰まり・血栓などが無いことを確認してから使用して下さい。

仕様

製品コード	型 式	カテーテルサイズ
34301440	NCV 29-8 ダブルルーメン	29G×80mm 50mm毎目盛付
34301430	NCV 29-12 ダブルルーメン	29G×120mm //
34301420	NCV 29-15 ダブルルーメン	29G×150mm //
34301410	NCV 29-20 ダブルルーメン	29G×200mm //

包装形態

1箱10セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2024年6月現在

告示名

021 中心静脈用カテーテル

(1) 中心静脈カテーテル ③極細型

償還価格：7,490円

- ・一般的なプラスチックカニューレ留置針をご使用の際は、使用する前に必ずカテーテルが挿入できるか確認して下さい。
- ・本製品をご使用になる前に、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

●関連製品

製品コード：26290010 「平セッシ 150mm」 2本入

製造販売届出番号：20B1X00005000025 一般医療機器 ピンセット

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)471-8561	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

フォルテグロウメディカル株式会社

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1647番地