

末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット 高度管理医療機器

未熟児・新生児用中心静脈注射用カテーテル
NCVカテーテルセット

NCV CATHETER SET 医療機器承認番号：20800BZZ00531000

シングルルーメン

適 応

未熟児・新生児の中心静脈栄養法



特 長

- ・NCVカテーテルは、未熟児・新生児用中心静脈注射カテーテルとしては非常に細い外径29G（相当）です。しかも、一定量の流量を得ることができます。
- ・一般的なプラスチックカニューレ型静脈留置針をイントロデューサーとしてご使用いただけますので、通常ご使用の留置針で穿刺ができます。
- ・カテーテル基は、留置針の外筒基と嵌合できる形状で、留置後の固定を容易に行うことができます。

使用方法

1. 穿刺部位（上腕正中皮静脈・背側中皮静脈・大伏在静脈等）を決定後、駆血・緊満させ、十分に消毒する。
2. 通常の留置針（イントロデューサーニードル）の穿刺手技で、穿刺部位の血管確保を行う。
3. フラッシュバック等により、確実に血管内に刺入されたことを確認後、留置針の外筒カニューレよりNCVカテーテル（以下カテーテル）を引き戻し操作を行わないように注意しながら、ゆっくり挿入する。
4. カテーテルを目標部位まで挿入後、エックス線透視等で先端位置の確認を行う。その後、スタイレット基を回しながらスタイレットをゆっくり抜去する。この時、カテーテルが直線状になるようにする。
5. 留置針の外筒カニューレを体内から抜去、消毒を行った後、カテーテル基と吻合させ、固定する。
6. カテーテルに輸液セット等を接続し、再度穿刺部位を消毒し、シーネ等を用いてカテーテルに負荷がかからないよう、また、動かないように確実に固定する。

仕 様

製品コード	型 式	カテーテルサイズ
34301150	NCV 29-8	29G×80mm 50mm毎目盛付
34301140	NCV 29-12	29G×120mm //
34301110	NCV 29-15	29G×150mm //
34301120	NCV 29-20	29G×200mm //

包装形態

1箱10セット入、1セット毎ピールオープン包装、EOG滅菌済

◆本製品は特定保険医療材料です◆

2024年6月現在

告示名

021 中心静脈用カテーテル

(1) 中心静脈カテーテル ③極細型 償還価格：7,490円

・一般的なプラスチックカニューレ留置針をご使用の際は、使用する前に必ずカテーテルが挿入できるか確認して下さい。

・本製品をご使用になる前に、必ず製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容をご確認ください。

●関連製品

製品コード：26290010 「平セッシ 150mm」 2本入

製造販売届出番号：20B1X00005000025 一般医療機器 ビンセット

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)471-8561	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

フォルテグロウメディカル株式会社

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1647番地