

八光超音波ガイド下

PTC-Dセット T型 1-step

適応

経皮的胆管ドレナージ
(主に肝内胆管径が5mm以上の場合)

特長

- ドレナージカテーテルは、金属スタイレットがセットされているEVタイプです。カテーテルの胆管挿入が容易に行えます。
- ドレナージカテーテルの胆管への挿入が超音波画像上で確認ができます。

◆本製品は特定保険医療材料です◆ 2024年6月現在

告示名：198ドレナージカテーテル 償還価格：5,700円

告示名：033経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料

機能別分類：(3) 穿刺針 償還価格：1,910円

手 技 (基本的な手技を記載しています。製品の注意事項等情報 (電子添文等) の内容を必ずご確認ください。)

- 1.術前準備：
通常の経皮的胆管ドレナージの手技に準じて行う。(消毒、麻酔含む)
- 2.胆管の穿刺：
外筒固定針を超音波穿刺用プローブに固定し、穿刺針を固定針に挿入する。
穿刺針の超音波画像の針先エコーを確認しながら、穿刺針を目標とする胆管に穿刺する。
穿刺針の内針を抜く。この時、胆汁の流出があることが多い。
穿刺針の刃面は肝門方向へ向ける。
- 3.ガイドワイヤー (別売) の挿入と穿刺針の抜去：
ガイドワイヤーの進入方向を超音波画像上で確認しながら挿入する。
十分にガイドワイヤーが挿入されたところで、穿刺針を抜去する。
ガイドワイヤーの位置を確認する。
挿入したガイドワイヤーの屈曲が強い場合、ダイレーター (別売) を用いてやや直線に近い形に補正しておく、次のEVドレナージカテーテルの挿入が容易になる。
- 4.カテーテルの挿入留置：
カテーテルの挿入はX線透視下で行う。
カテーテルをガイドワイヤーに沿ってゆっくり挿入する。
内針が僅かに胆管に挿入されたところで、内針を固定して外管カテーテルだけを送り込む。
この時、内針が胆管内に迷入しないようにしっかり固定する。
内針を抜去する。
- 5.胆汁の吸引・造影：
胆汁を吸引し、胆道造影でカテーテルの位置等を確認する。
- 6.カテーテルの固定：
カテーテルをカテーテル固定板によって腹壁に固定する。固定板と皮膚の固定は、皮膚が壊死を起こさないよう縫合糸で緩く行う。
固定板とカテーテルは強く固定する。
必要に応じて固定用粘着テープで固定する。
- 7.ドレナージ：
カテーテルを延長チューブ等を介してドレナージバックと接続する。

仕 様		管理医療機器 短期的使用胆管用カテーテル	
製品コード	セット内容	包装形態	
22110350	外筒固定針 1step用 14G×85mm (22990020)	1箱1セット入、 1セット毎ピールオープン包装、 EOG滅菌済	
	穿刺針 18G×180mm (22410010)		
	EVドレナージカテーテル 17G×270mm (22210100)		
	カテーテル固定板 ベルト付き		
	カテーテル固定板 ベルトなし		

※本セットは、セットを構成する部品単独での販売も行なっています。上記表の () に記載の8桁の数字が部品単独の製品コードです。
最小販売単位は1箱です。(外筒固定針および穿刺針は1箱10本入、EVドレナージカテーテルは1箱2本入)

併用器具 (別売)				医療機器承認番号：16300BZZ00863000			
製品名	製品コード	サイズ	包装形態	製品名	製品コード	サイズ	包装形態
八光ガイドワイヤーNV	22330200	AC917 J 0.8(0.032)×800mm	1箱2本入、 EOG滅菌済	ダイレーター	22510020	7Fr × 200mm	1箱5本入、 EOG滅菌済
					22510030	8Fr × 200mm	
					22510040	9Fr × 200mm	

告示名：197 ガイドワイヤー 償還価格：1,870円 2024年6月現在

告示名：033 経皮的又は経内視鏡的胆管等ドレナージ用材料 償還価格：2,180円 2024年6月現在

機能別分類：(2) ダイレーター

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報 (電子添文等) の内容を必ずご確認ください。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530	横浜 (045)471-8561	名古屋 (052)732-8503	福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502	長野 (026)276-3083	大阪 (06)6453-9102	熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580	金沢 (076)225-8560	岡山 (086)243-3985	本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500	静岡 (054)282-4185	松山 (089)935-8517	(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

3
画像診断Ⅱ「ドレナージ」

2405(A)