




管理医療機器 単回使用開眼器
承認番号：22600BZX00442000

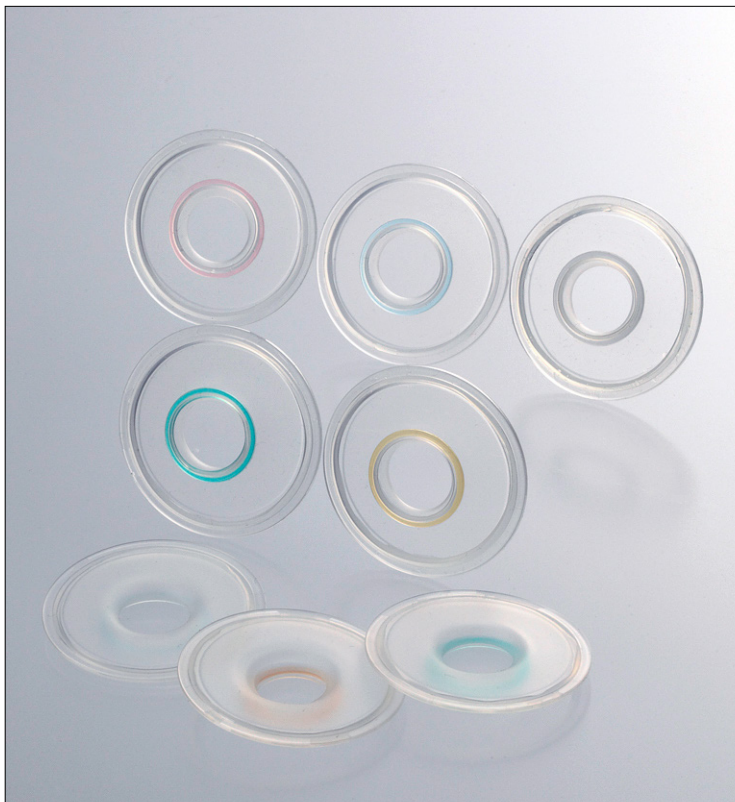

適応

- 硝子体内注射 等

特長


- 眼科手術及び検査時に、容易で確実に睫毛や眼瞼をドレーピングでき、かつ十分な術野が確保できるディスプレイ製品です。
- 上下リングの間に眼瞼を挟み込み、術野への睫毛の脱失を防ぎ、眼瞼に密着し、眼瞼からの分泌物を物理的に遮断します。
- リドレープ®を使用することで、術後の感染予防の効果が期待できます。

Lid・・・瞼
Drape・・・ドレープ
Lid + Drape = "LiDrape" の合成語です。



写真提供：久留米大学 眼科 教授 山川 良治先生
うらの眼科クリニック 浦野 哲先生

構成図及び使用方法

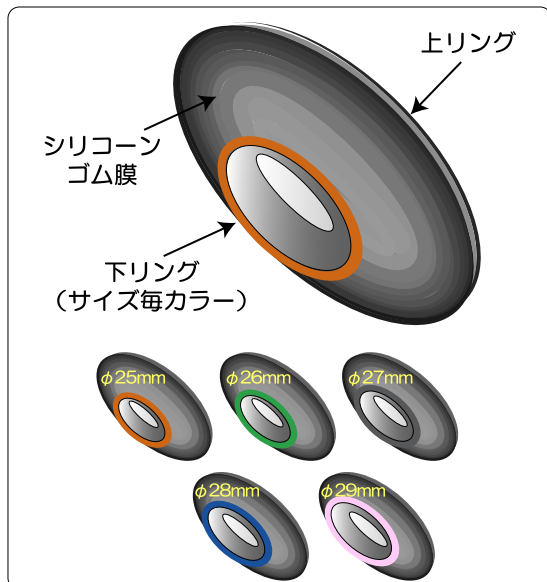

*【リドレープ専用スケール】にて使用サイズを決定してください。

下リングの大きさは、瞼裂幅と同じか、瞼裂幅から1mm減算した大きさが適応サイズになります。



【リドレープ専用スケール】は、最寄りの支店・営業所にて取り扱っております。

◆リドレープの装着及び使用方法

1. 本製品の上リングの端部と端部を指でつかんで湾曲させます。(右写真)
2. 下リングを上眼瞼側より結膜嚢内に挿入します。
3. 下眼瞼を指で下方に開眼させつつ、下リングを下眼瞼の結膜嚢内へ挿入します。上リングの湾曲を元に戻して、装着完了です。
4. 中央の開口部を術野として手技を行ってください。
5. 取り外す場合には、上リングを指でつかんで湾曲させ、下眼瞼を指で下方に開眼させつつ下眼瞼側から下リングを取り外します。



◆術中に緊急で閉眼したい場合

1. 上リング付近ヘメスで切開を入れ、上リングに沿ってシリコンゴム膜を上リングから切り離し、シリコンゴム膜にかかっている張力を解除してから閉眼します。
2. 状態が落ち着いた後、シリコンゴム膜を保持した状態で、下リングを眼瞼から取り外します。

仕様

「*」は準規格品です。

製品コード	規格 (上リング×下リング)	下リングカラー	包装形態
26370010	φ58×φ25mm	オレンジ	1箱5個入 1個毎ピールオープン包装 EOG滅菌済
26370020*	φ58×φ26mm	グリーン	
26370030	φ58×φ27mm	グレー	
26370040*	φ58×φ28mm	ブルー	
26370050*	φ58×φ29mm	ピンク	

参考文献

- ◆浦野 哲：ドレープ付き開眼器の開発：IOL&RS Vol.22 No.4 Dec 2008. 510-511
◆Toru Urano et al. Development of a novel disposable lid speculum with a drape: Clinical Ophthalmology 2013;7 1575-1580