

ディスポーザブル

S.A.N.D. マニピュレーター

S.A.N.D. MANIPULATOR

医療機器承認番号：20900BZZ00741000

子宮操作用セット

管理医療機器

特長

- 先端の2つのバルーンで、子宮内部と子宮入口を固定でき、確実な子宮操作ができます。
- バルーンによる固定で、マニピュレーターの術中における位置ずれが防止できます。
- マニピュレーターの内部ルート（注入・送水ポート）から卵管等への色素注入が可能です。

＜タイプ選択の目安＞

レギュラータイプ：卵巣嚢腫や癒着剥離等の処置。
未産婦の処置など。

ラージタイプ：LAVHなど。子宮筋腫が200g以上の
(ハード仕様)：大きな筋腫切除など。

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報
(電子添文等)の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、
使用上の注意等重要な事項が記載されています。

適応
内視鏡下外科手術に
おける子宮操作

ソフトチップ

先端バルーン：グリーン

手前バルーン：透明

注入・送水ポート

グリーンマーキング


先端バルーン注入用

手前バルーン注入用


(それぞれの注入用は一方方向バルブです。)

バルーンへの注入量の目安


レギュラータイプ

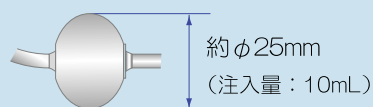

ラージタイプ (ハード仕様)

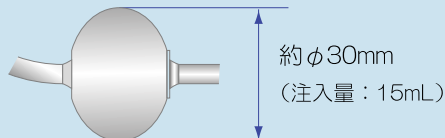

レギュラータイプ

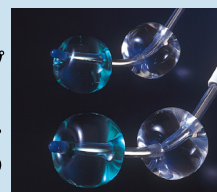ラージタイプ
(ハード仕様)

仕 様

製品コード	タイプ	バルーン部外径	全長	付属シリンジ
29110720	レギュラー	約φ5mm	340mm	10ml バルーン注入用(1本)
29110820	ラージ (ハード仕様)	約φ7mm	340mm	20ml バルーン注入用(1本)

包装形態

1箱1セット入、1セット毎ピールオープン包装 EOG滅菌済