
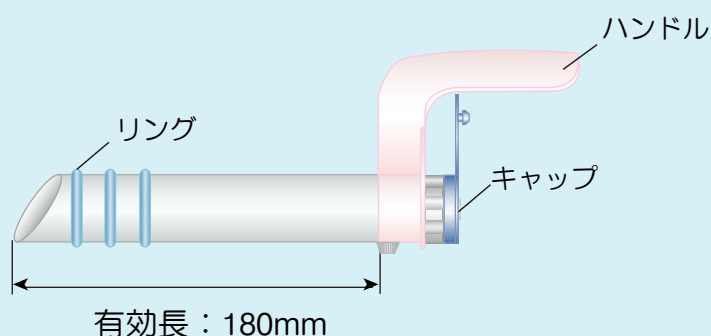


Vagi-パイプ Type A

医療機器届出番号：20B1X00005000001 一般医療機器 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器

用途 内視鏡用拡張器

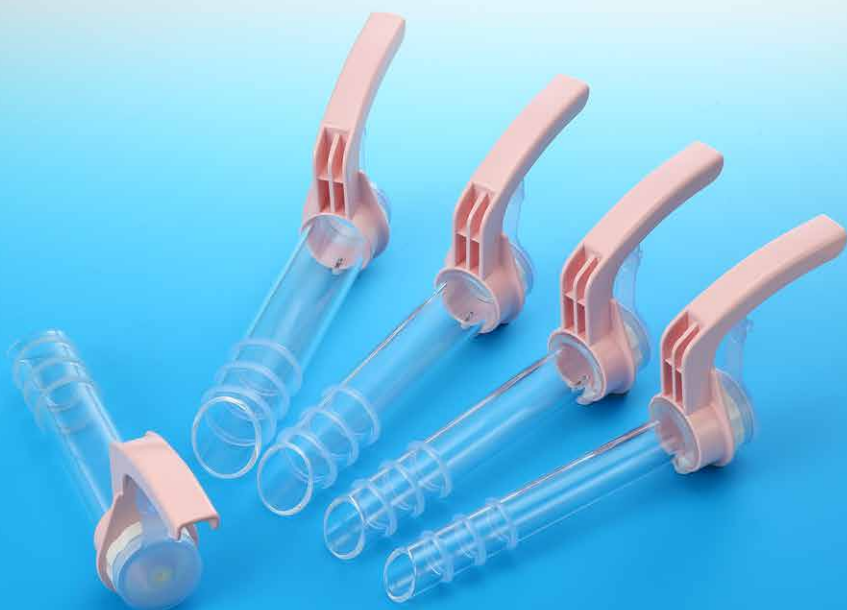

【TLHで使用の際、下記の一助となる】

- 前腔円蓋部の同定
- 尿管および子宮動脈の確認
- 切離後の伸展補助と止血
- 腔口からのリーク防止

※TLH…Total Laparoscopic Hysterectomy
全腹腔鏡下子宮全摘出術

＜使用方法＞

【TLHで使用する場合】

- ①TLHにおける腔壁切離の際、Vagi-パイプを腔より挿入し、Vagi-パイプ先端部を腔円蓋部に押し付ける。
- ②尿管および子宮動脈の分離を確認後、腔円蓋部を同定し、腔壁の切離線を決定する。
- ③Vagi-パイプ先端部で腔壁を伸展させながら電気メスなどで切離する。
- ④腔壁を全周切離した後、Vagi-パイプを腔から抜き、経腔的に子宮を摘出する。
- ⑤Vagi-パイプを再度腔より挿入し、腔壁断端、骨盤腹膜の順に閉鎖縫合する。

仕様

製品コード	規格	呼称
29111201	40/34×180mm	L
29111211	35/29×180mm	M
29111221	30/24×180mm	S
29111191	25/19×180mm	XS

包装形態

1箱1本入 EOG滅菌済

＜部品（別売り）＞



5mmリデューサー

用途：鉗子類を挿入する際のリーク防止
製品コード：29111290
包装形態：1箱5本入 EOG滅菌済



▲製品の紹介動画はこちら

本製品をご使用になる前に、製品の注意事項等情報（電子添文等）の内容を必ずご確認ください。
注意事項等情報には、「禁忌・禁止」事項や使用方法、使用上の注意等重要な事項が記載されています。

販売窓口

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル TEL (03)5804-8500
ホームページ <https://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 (011)215-1530 横浜 (045)471-8561 名古屋 (052)732-8503 福岡 (092)411-4100
仙台 (022)257-8502 長野 (026)276-3083 大阪 (06)6453-9102 熊本 (096)288-4690
柏 (04)7131-8580 金沢 (076)225-8560 岡山 (086)243-3985 本郷商品管理センター
本郷 (03)5804-8500 静岡 (054)282-4185 松山 (089)935-8517 (03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光
メディカル事業部

hakko®

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

8

内視鏡下外科手術器具

2501(c)