

# セルフバルーンカテーテル

SELF BALLOON CATHETER

必要なときだけ留置、  
確実な排尿管理へ



## 特長

### ●フラット構造で違和感軽減

先端バルーンがフラット形状で、挿入・抜去時の引っかかりや違和感を軽減。身体へのやさしさに配慮した設計です。

### ●片手で簡単開閉

キャップにマグネットを使用しているため、片手で、弱い力で容易に開閉できます。

### ●夜間使用に最適（スポットバルーンとして）

夜間の排尿管理をサポート。睡眠の質向上に貢献。

**HAKKO**<sup>®</sup>


心のかよう医療器ハッコー

本製品は、一回限りで再度のご使用は行わないでください。  
製品の仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。


**適応** ● 排尿障害の尿路管理

■ 構成品と各部の名称


● カテーテル

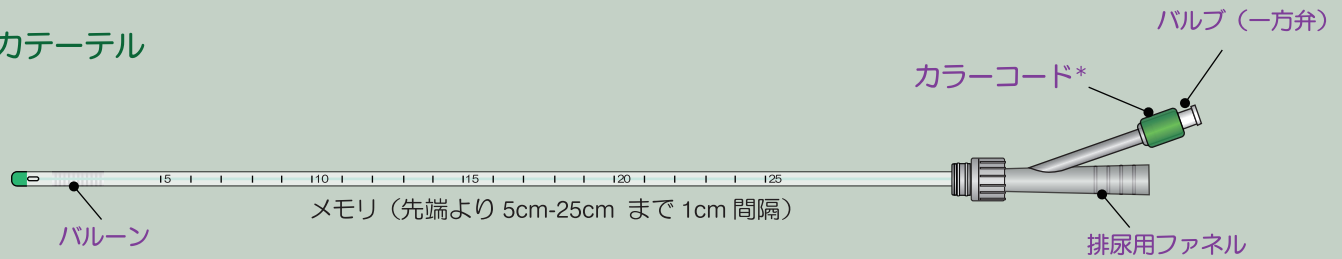


● カテーテルケース

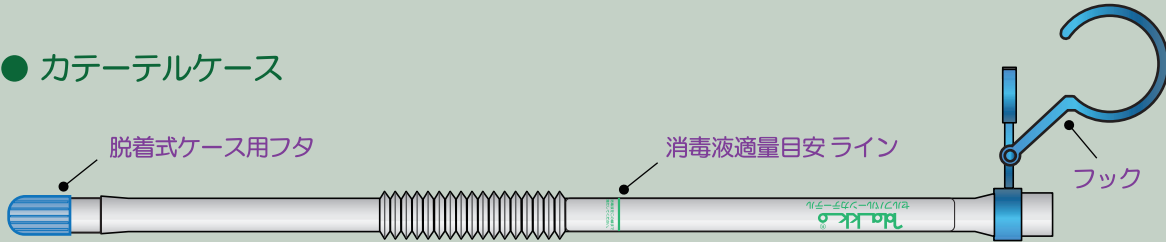


● マグプラグ

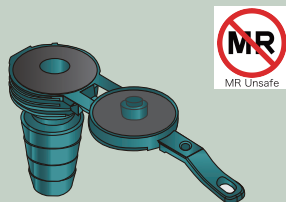

● 延長ファネル

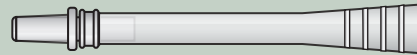

● リザーバー (シリンジ)

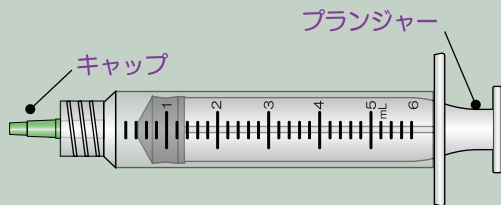

● 収納ケース



事前に準備するもの

- セルフバルーンカテーテル
- 医療機関より指示された滅菌精製水
- 医療機関より指示された消毒液

\*滅菌精製水と消毒液については、医療機関から指示されたもの以外は使用しないでください。  
\*消毒液と潤滑剤があらかじめ混合されていることがあります。

**必要時** 潤滑剤又は潤滑ゼリー、排尿バッグ、洗浄綿又はウェットティッシュ

本製品は必ず医師等から使用方法および使用上の注意について指導を受け、その管理下において使用してください。

マグプラグ操作方法



■ 製品名：セルフバルーンカテーテル 医療機器認証番号：307AFBZX00040000 一般的名称：間欠泌尿器用カテーテル

仕様				
製品コード	型式・サイズ	カラーコード	バルーン容量	セット内容
35020020	SBカテーテル 4.7mm(14Fr) 有効長：300mm	グリーン	5mL	カテーテル、マグプラグ、リザーバー (シリンジ) ケース、延長ファネル、収納ケース
包装形態				
1箱2セット入、1セット毎ピールオープン包装 (未滅菌品)				

販売窓口 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目42-6 南江堂ビル ☎(03)5804-8500  
ホームページ <http://www.hakko-medical.co.jp/>

札幌 ☎(011)215-1530 横浜 ☎(045)471-8561 名古屋 ☎(052)732-8503 福岡 ☎(092)411-4100  
仙台 ☎(022)257-8502 長野 ☎(026)276-3083 大阪 ☎(06)6453-9102 熊本 ☎(096)379-5806  
柏 ☎(04)7131-8580 金沢 ☎(076)225-8560 岡山 ☎(086)243-3985 本郷商品管理センター  
本郷 ☎(03)5804-8500 静岡 ☎(054)282-4185 松山 ☎(089)935-8517 ☎(03)5840-8502

製造販売

株式会社 八光  
メディカル事業部

hakkō

〒389-0806 長野県千曲市大字磯部1490番地

2603(S)