

HAKKO MAG PLUG

ハ光 マグプラグ



適応 排尿時及び蓄尿時の排出に使用。尿路用のカテーテルと併用できます。

ピタツと閉じて、
清潔キープ!



簡易操作


簡単操作で自己導尿カテーテルへ接続し、排尿ができます。
キャップにマグネットを使用しているため、片手で、なおかつ弱い力で開閉操作が容易に行えます。

採尿バッグが不要

目立たないため、おしゃれを楽しむことや旅行等へ活動的になります。

安心・清潔

キャップはマグネットにより密閉されており尿が漏れることはありません。

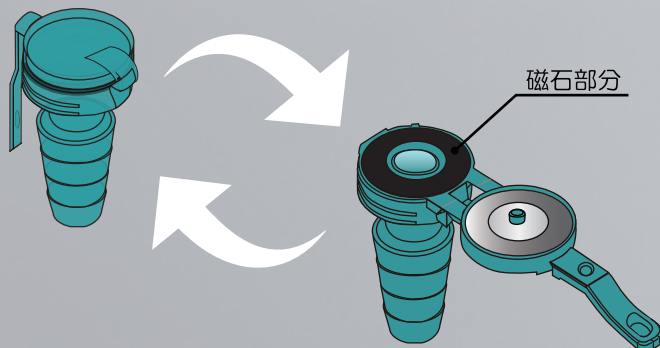

注意事項

- 排尿後はフタの水気を拭き取ってください。
- マグプラグ内の汚れは綿棒等で掃除してください。
- 長期使用により付着した尿中の成分が感染の原因となる可能性があります。
- マグプラグは磁石を使用していますので、他の医療機器・時計・磁気カード等、磁気の影響を受けるものには、近づけないでください
- 交換時期の目安は30日以内です。

MRI環境下での使用禁止

仕 様

製品コード	製品名	包装形態
35010010	マグプラグ	1箱10個入 EOG滅菌済